


- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore destinato alla stabilizzazione meccanica, all'immobilizzazione ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione dell'anca. Utile, ad esempio, nei casi di: coxartrosi non operabile; lussazione d'anca; lussazione articolare protesica totale ed endoprotesi; fratture composte del cotile; prossimali del femore, periprotetische del terzo prossimale del femore; post operatorio embiaco; acetabolo; esiti ri protesi anca.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

 Fabbricante	 Dispositivo medico	 Codice prodotto	 Conservare lontano da fonti di calore
 Consultare le istruzioni d'uso	 Conservare in ambiente secco	 Codice lotto	 Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

 **FGP srl**
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRIMA103
Rev. 04 - 07/23



IMA-103

Tutore funzionale R.O.M. per anca








Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino
- e coscia in materiale plastico
- imbottitura in morbida monospugna all'interno
- e vellutino grippante all'esterno

SNODS

- vite di allineamento asta femorale
- disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pros. (B)	Ø Distale (C)
S	70-80 cm	38-46 cm	35-40 cm
M	81-100 cm	47-56 cm	41-47 cm
L	101-115 cm	57-66 cm	48-54 cm
XL	116-135 cm	67-76 cm	55-62 cm

Codici d'ordine: IMA-103 DX; IMA-103 SX



PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Regolazione della flessione-estensione

1. Allentare la vite in A fino ad allontanare i denti di aggancio-blocco dai denti delle due corone di aggiustamento della flessione-estensione, visibili dalla finestra di controllo.
2. Agendo sulle leve B e C si potrà impostare la regolazione desiderata in flessione-estensione con incrementi di 10°. Ad operazione ultimata, si dovrà agire di nuovo sulla vite A così da bloccare la regolazione.

Regolazione della abduzione e dell'adduzione

1. Allentare la vite D fino a consentire lo sblocco dello snodo, regolato in origine a 0° (salvo richiesta specifica), e regolare l'angolo di abduzione e adduzione desiderata che si otterrà con incrementi di 7,5°. A regolazione avvenuta, si dovrà agire ancora sulla vite per il blocco definitivo.

⚠ N. B. Non intervenire mai sulle parti qui non citate.

⚠ La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni del tutore devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

Descrizione delle parti di regolazione

A
Vite di fissaggio per la regolazione in flessione-estensione

E
Scala graduata per la regolazione in flessione-estensione

C/B
Leve di regolazione della flessione-estensione

D
Vite di regolazione per abduzione e adduzione

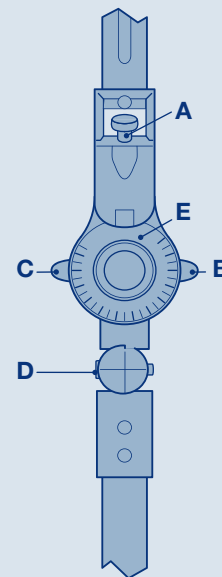


TABELLA REGOLAZIONI

Ext.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°
Flex.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°			
Imm.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°

COME INDOSSARE IL TUTORE

1. Aprire tutte le chiusure e indossare il tutore seguendo la modalità suggerita dalle frecce del disegno (fig. 1).
2. Quando il tutore è in posizione, regolare la cintura alla circonferenza della vita fino ad ottenere un buon appoggio delle due prese (fig. 2).
3. Posizione corretta del tutore (fig. 3).

