

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata del fabbricante.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attenderne il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore destinato alla stabilizzazione meccanica, all'immobilizzazione ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione dell'anca. Lussazione artroscopica totale ed endoprotesi; fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetische del terzo prossimale del femore; post operatorio embiaco, acetabolo; esiti riptrotesizzazioni anca.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante	Dispositivo medico	Codice prodotto	Conservare lontano da fonti di calore
Consultare le istruzioni d'uso	Conservare in ambiente secco	Codice lotto	Uso multiplo singolo paziente

CE AZIENDA CERTIFICATA ISO 13485:2016

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

FISTRIMA150
Rev. 05 - 07/23



FGP
Orthopedic & Rehabilitation Equipment

IMA-150

Tutore funzionale R.O.M. per anca ambidestro

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottitura in vellutino gripante
- **SNODO**
- vite di allineamento asta femorale
- disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
- **CHIUSURA**
- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

Taglie (ambidestro)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

Codice d'ordine: IMA-150

ISTRUZIONI PER L'USO

Modificare il verso del tutore da destro a sinistro

Togliere l'imbottitura della cintura
Svitare le due viti (fig. 1)

Sollevarne l'asta e riposizionarla
sul lato sinistro (fig. 2)

Inserire le viti e procedere
all'avvitamento sul verso sinistro (fig. 2)






Riposizionare l'imbottitura vita
per il verso sinistro e il sistema a strappo
di chiusura della cintura (figg. 3-4)

Aprire il cinghiaggio dell'imbottitura coscia
nella parte frontale

Togliere l'imbottitura coscia (fig. 5)

Riposizionare l'imbottitura sul tutore per
il verso sinistro (fig. 6)

Posizionare il sistema a strappo
correttamente e chiudere il cinghiaggio
(figg. 7-8)

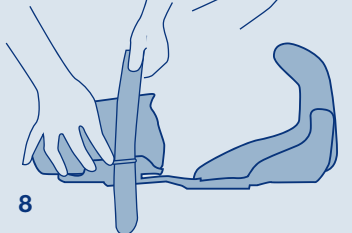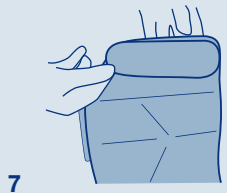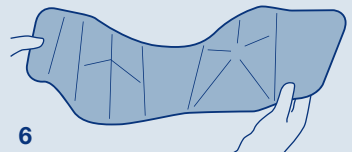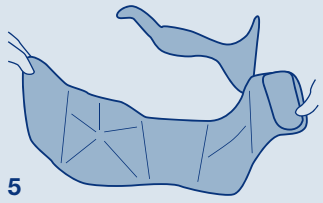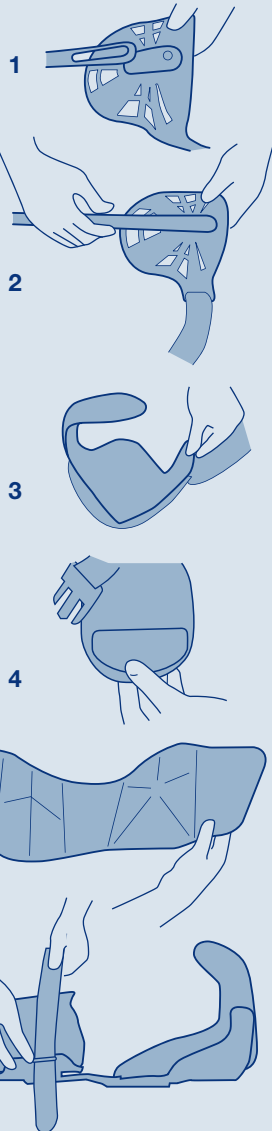

⚠ La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni del tutore devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

Regolazione della flessione-estensione

1. Allentare la vite in A fino ad allontanare i denti di aggancio-blocco dai denti delle due corone di aggiustamento della flessione-estensione, visibili dalla finestra di controllo.
2. Agendo sulle leve B e C si potrà impostare la regolazione desiderata in flessione-estensione con incrementi di 10°. Ad operazione ultimata, si dovrà agire di nuovo sulla vite A così da bloccare la regolazione.

Regolazione della abduzione e dell'adduzione

1. Allentare la vite D fino a consentire lo sblocco dello snodo, regolato in origine a 0° (salvo richiesta specifica), e regolare l'angolo di abduzione e adduzione desiderata che si otterrà con incrementi di 7,5°. A regolazione avvenuta, si dovrà agire ancora sulla vite per il blocco definitivo.

⚠ **N. B. Non intervenire mai sulle parti qui non citate.**

Descrizione delle parti di regolazione

A
Vite di fissaggio per la regolazione in flessione-estensione

E
Scala graduata per la regolazione in flessione-estensione

C/B
Leve di regolazione della flessione-estensione

D
Vite di regolazione per abduzione e adduzione

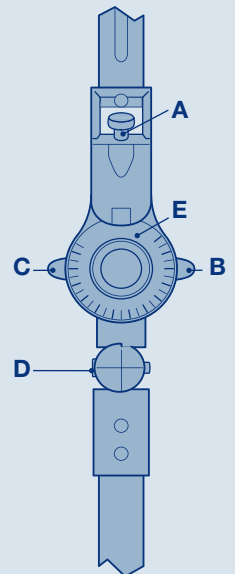


TABELLA REGOLAZIONI

Ext.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°
Flex.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°			
Imm.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire tutte le chiusure e indossare il tutore seguendo la modalità suggerita dalle frecce del disegno (fig.1).
2. Quando il tutore è in posizione, regolare la cintura alla circonferenza della vita fino ad ottenere un buon appoggio delle due prese (fig.2).
3. Posizione corretta del tutore (fig. 3).

