

IMB 700

COJÍN PARA LA ABDUCCIÓN DEL BRAZO Y EL HOMBRO DE 10° A 20°



EMPRESA CERTIFICADA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 2 - 10/20



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
facebook.com/fgpsrl



Este dispositivo médico no ha estado concebido para ser utilizado, sin la debidas advertencias explicadas en las instrucciones y llevadas a cabo por el técnico ortopédico o del médico prescriptor. Para cualquier problema surgido después del uso del dispositivo, consulte con el médico prescriptor o con el técnico ortopédico. En caso de reclamaciones o mal funcionamiento diríjase a FGF SRL, indicando los motivos al número de teléfono 045 8600867, o enviar un e-mail a fgp@fgpsrl.it. La ortesis ha sido fabricada para el uso exclusivo de un solo paciente. DISTRIBUIDO en España POR medi Bayreuth España S.L., teléfono 0034932600400, e-mail medi@mediespana.com

NOTA

Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente. Proteger del calor, de la exposición directa a la luz del sol y de la humedad. No desecar en el medio ambiente.



CONSERVACIÓN

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavar a mano normal a una temperatura máxima de 30° con jabón neutro. Enjuagar correctamente.
	No blanquear.
	No secar en máquina secadora con tambor rotativo.
	No planchar.
	No lavar en seco.

CUIDADOS


- Utilizar sobre la piel sana
- Si existen heridas deben estar cubiertas de modo adecuado siguiendo las instrucciones del médico
- No utilizar en caso de rotura o que esté comprometida la integridad del material
- Se aconseja no colocar la ortesis en contacto directo con la piel, hacerlo sobre una camiseta



ADVERTENCIAS DE USO

Ajustar adecuadamente la longitud de las correas de la cintura y el hombro para permitir la versatilidad correcta de la ortesis.

PARA EL TÉCNICO ORTOPÉDICO:

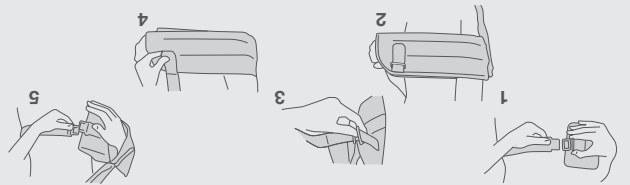

1. Separar la bolsa del cabestrillo del cojín (solo en la primera aplicación).
2. Abrir el cierre de la correa de la cintura y colocar el cojín en el lado del brazo a abducir. El extremo más largo del cojín quedará apoyado en la pared abdominal. Girar alrededor de la cintura.
3. Acharrar el cabestrillo al cojín (solo en la primera aplicación). Abrir el cierre de la correa del hombro e introducir el antebrazo en la bolsa opuesta de forma que el codo quede lo más atrás posible (fig. 2).
4. Pasar la correa del hombro diagonalmente, introducir la en las dos anillas planas que han quedado libres colocadas sobre la bolsa.
5. Para retirar la faja, abrir la correa del hombro (fig. 3) y la hebilla de la correa de la cintura (fig. 5).

INSTRUCCIONES DE USO

Talla única ambidextra.

MEDIDAS

Después de fracturas humerales
Tratamiento de abducción de 10° a 20° en la fase de rehabilitación

INDICACIONES

Cójín de poliuretano expandido recubierto de un cómodo tejido de algodón y equipado mediante un sistema de cierre de cinchas ajustable para garantizar una versatilidad óptima.

DESCRIPCIÓN