



AVVERTENZE D'USO



- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato
- Si consiglia di non indossare il dispositivo a diretto contatto con la pelle. Indossare una maglietta o una canottiera

Al momento nessuna nota.
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 2 - 04/20



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
facebook.com/fgpsrl



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

IMB-750

Cuscino abduttore per spalla
da 10° a 30°

MISURE

Taglia unica ambidestra.

Codice d'ordine:
IMB-750

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna.
- richiesta pallina riabilitativa
- dotato di fascia addominale regolabile
- con fasce in vellutino a strappo con manico imbottito di protezione collo e cinghia sottocellulare per la redistribuzione del peso

STRUTTURA SACCA REGGIRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grigio all'esterno

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico con copertura in vellutino grigio
- da 10° a 30°

GRADO ABDUZIONE

NOTA

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.

CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente secco da fonti di calore



SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Fisciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

MANUTENZIONE

Questo dispositivo non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. Indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. Si consiglia l'uso personale del prodotto.


ISTRUZIONI PER L'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE: INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

Avvertenza

La prima applicazione del tutore e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante.


1. Separare la sacca reggibraccio dal cuscino.
2. Aprire la chiusura della cintura vita e considerando il braccio interessato, posizionare il cuscino sul fianco del paziente. Far girare intorno alla vita la cintura e fissare con la chiusura a scatto che si troverà sulla parte frontale (fig. 1).

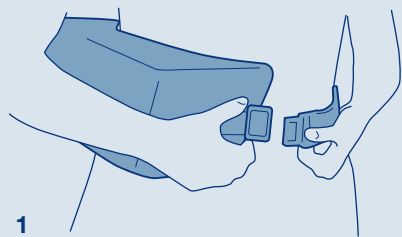


1




2

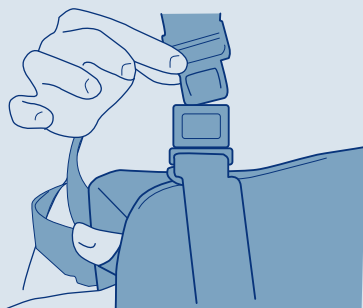


3

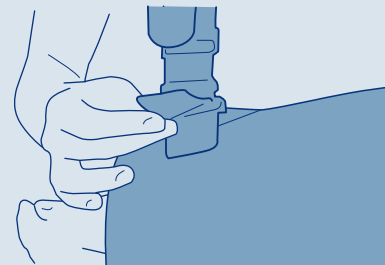


4

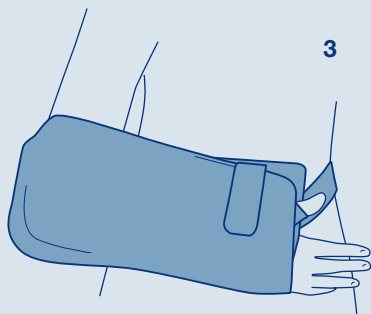

5

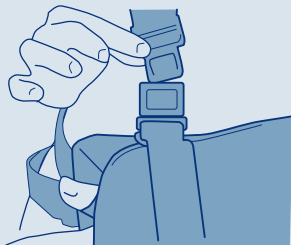

6

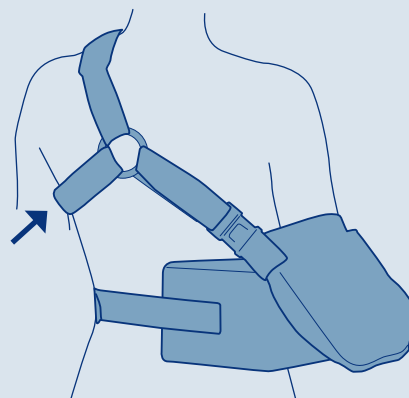

7

3. Far aderire il reggibraccio al cuscino.
4. Aprire la chiusura a scatto della cintura spalla e la fascia a strappo della sacca come in figura 4, inserire l'avambraccio nell'apposito reggibraccio in modo che la posizione del gomito sia più arretrata possibile (fig. 5). Chiudere la fascia a strappo della sacca (fig. 4).
5. Recuperare con il braccio libero la cintura con gli anelli, passarla sopra la spalla posizionandola alla base del collo ed infine fissarla al cuscino mediante la fibbia posta sopra la sacca (fig. 6).
6. Infine chiudere con la fascia a strappo la cintura sotto-ascellare, opzionale (fig. 7).

Accorciare opportunamente la lunghezza delle cinture per consentire la corretta vestibilità dell'ortesi.

APPLICAZIONI SUCCESSIVE

Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

Per le applicazioni successive: indossare e togliere il tutore utilizzando le fibbie a scatto (fig. 1 e fig. 2).