

- Utilização em pele intacta.
- Se presentes feridas, proteger conforme as indicações médicas.
- Não utilizar em caso de desgaste, ruptura ou não integridade do material.
- A proteção deve ser usada com uma camisa ou camisola interior.
- A embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
- A modificação/alteração do dispositivo médico exclui todas as responsabilidades do fabricante.
- Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, recomenda-se evitar/limitar o contacto entre o dispositivo e cremes, óleos, loções ou substâncias gordurosas ou no ácido.
- Não modifique os ajustes efetuados pelo médico ou pelo técnico de ortopedia.
- No DM para não levar a uma perda de funcionalidade do produto.
- O produto não prevê acessórios e não foi concebido para ser utilizado em combinação com outros DM (por ex., no caso de aplicação de cremes, aguarde o tempo necessário para a sua absorção completa).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INDICAÇÕES: proteção destinada ao suporte mecânico do membro superior. Utili, por exemplo, nos casos de: pós-trauma do ombro e cotovelo; entesopatia calcificada do ombro em fase aguda; rotura atarrámatica do cabeça longa do biceps; fase aguda de artrose glenoumeral e/ou acromioclavicular; tratamento do braço pênulo (lesões do plexo braquial).

CONTRAINDICAÇÕES: no momento, sem registo. A aplicação correta, de acordo com as indicações precisas fornecidas pelo médico assistente ou técnico de ortopedia, não dá origem a contra-indicações. **APLICAÇÃO:** apenas para adultos.



Fabricante

MD

Dispositivo médico

REF

Código do produto



Guarde longe de fontes de calor



Consulte as instruções de utilização



Guarde em local seco

LOT

Código do lote



Utilização múltipla num único paciente



EMPRESA CERTIFICADA
ISO 13485:2016

FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISIPORTRGB100
Rev. 09 - 06/23



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



RGB-100

Apoio de braço simples




FGP


Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Use a proteção. Coloque o antebraço na bolsa apropriada para que a posição fique o mais retraída possível e, em seguida, insira, se necessário, o polegar no anel de suporte apropriado (fig. 1).

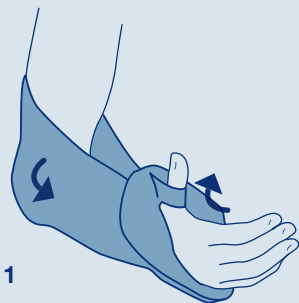

2. Faça passar a faixa de suporte sobre o ombro oposto e, em seguida, faça uma passagem dupla através da fivela de ajuste (fig. 2).

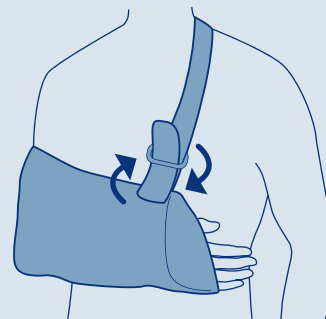

ESTRUTURA

- macia com saco de algodão e cinto de ombro ajustável com fivela equipada com tubo de proteção de pescoço

FECHO

- por fivela

MEDIDAS (ambidextro)

Tamanhos Comprimento do antebraço

S	até 32 cm
M	33–40 cm
L	acima 40 cm



Código de pedido: ERGB-100

LIMPEZA

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem à mão. NOTA: lavagem à mão normal à temperatura máxima de 30° com sabão neutro. Passar bem por água
	Não branquear
	Não secar na máquina de lavar roupa de tambor rotativo
	Não engomar
	Não lavar a seco

ARMAZENAMENTO: armazenar em local seco à temperatura ambiente.

Proteja do calor, da exposição direta à luz solar e da humidade. **Eliminação: não disperse no ambiente. O produto pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.**

NOTA: Este dispositivo médico de Classe I deve ser utilizado com as devidas precauções referidas nestas instruções, em combinação com as fornecidas pelo técnico ortopédico ou pelo médico assistente, que fazem parte integrante da mesmas. Para todas as eventuais problemáticas surgidas em consequência da utilização do dispositivo, dirija-se ao médico assistente ou ao técnico de ortopedia. Em caso de reclamações ou alegados maus funcionamentos, queira dirigir-se ao revendedor junto do qual foi adquirido o produto. A ortótese é fabricada para utilização exclusiva num único paciente. Em caso de acidente grave, morte ou deterioração grave do estado de saúde do doente, relacionáveis com o **DM**, contacte imediatamente o fabricante e a autoridade competente.

Distribuído em Portugal por: medi Bayreuth, Unip., Lda
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt /internet: www.medi.pt