

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO [MD] coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

INDICAZIONI: post trauma spalla e gomito; entesopatia calcifica della spalla in fase acuta; rottura atraumatica del capolungo del bicipite; fase acuta di artrosi glomerale e o acromion clavareo; trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale).

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Si consiglia di non usare il dispositivo a diretto contatto con la pelle.
- Indossare una maglia o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).




RGB-150


Reggibraccio semplice
con regolazione a strappo

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il tutore. Posizionare l'avambraccio nell'apposita sacca in modo che la posizione sia il più arretrata possibile, quindi inserire, se necessario, il pollice nell'apposito anello di sostegno.

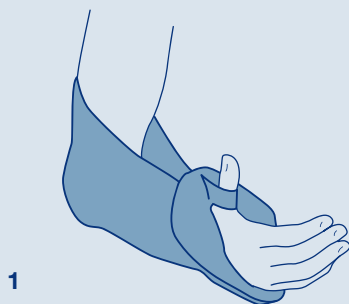

2. Far passare la fascia di sostegno sopra la spalla opposta, quindi fare passare attraverso la fibbia, infine chiudere su se stessa.

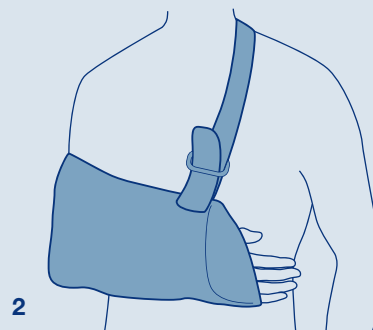

STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla in vellutino regolabile con sistema a strappo

CHIUSURA

- a strappo

MISURE

Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 32 cm
M	33–40 cm
L	oltre 40 cm



Codice d'ordine
RGB-150

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. **Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.



Conservare in ambiente secco



Conservare lontano da fonti di calore



Single patient multiple use



Dispositivo medico