

# IMB 300

## Imobilizador do braço e do ombro com suporte para o cotovelo

### AVISOS DE USO

- Use na pele intacta.
- Se houver feridas, proteja de acordo com as indicações médicas.
- Não use em caso de desgaste, rutura ou não integridade do material.
- Recomenda-se não usar o dispositivo em contato direto com a pele. Use uma camisa ou top.
- A embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
- A modificação / alteração do dispositivo médico exclui qualquer responsabilidade ao fabricante.
- Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, é aconselhável prevenir / limitar o contato do aparelho com cremes, óleos, loções ou substâncias gordurosas ou ácidas.
- O produto não inclui acessórios e não foi projetado para ser usado em combinação com outros **MDs** (ex: em caso de aplicação de cremes aguardar o tempo necessário para a completa absorção).

Rev. 5 - 07/22



EMPRESA CERTIFICADA  
ISO 13485:2016



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



FGP srl

Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



**NOTA:** este dispositivo médico de classe I deve ser usado como as devidas advertências indicadas nas presentes instruções, em combinação com as fornecidas pelo técnico de ortopedia ou pelo médico assistente, que fazem parte integrante das mesmas. Para todas as eventuais problemáticas surgidas em consequência da utilização do dispositivo, dirija-se ao médico assistente ou ao técnico de ortopedia. Em caso de reclamações ou alegados mau funcionamento, queira dirigir-se ao revendedor junto do qual foi adquirido o produto. A ortese é fabricada para utilização exclusiva em rotas grave das condições de saúde do paciente, relacionado com **MDI**, queira contactar imediatamente o fabricante e as Autoridades competentes.

**Distribuído em Portugal por:**  
Medi Bayreuth, Unip., Lda  
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa  
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33  
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt / internet: www.medi.pt

**CONSERVAÇÃO:** conserve num local seco à temperatura ambiente. Proteja do calor, da exposição direta à luz solar e da humidade. **Eliminação: não dispense no ambiente. O produto pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.**

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem normal à mão a uma temperatura máxima de 30 ° com sabão neutro. Enxaguar abundantemente.
	Não usar branqueadores.
	Não secar na máquina de lavar roupa de tambor rotativo.
	Não passar a ferro.
	Não limpar a seco.


### MANUTENÇÃO

**DESTINO DO DISPOSITIVO MÉDICO MD** adjuvante no tratamento de estados patológicos de natureza ortopédica do membro superior.

**CONTRA-INDICAÇÕES:** não conhecidas até ao momento. A aplicação correta de acordo com as indicações fornecidas pelo médico assistente ou técnico ortopédico, não dá origem a contra-indicações.

**APLICAÇÃO:** apenas para adultos.

### PARA A PRIMEIRA APLICAÇÃO:

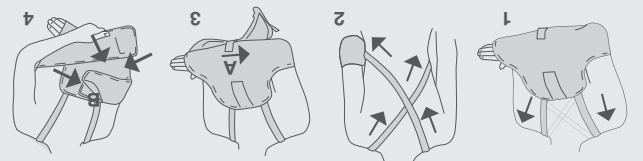

1. Colocar o antebraço dentro da bolsa como na fig. 1.
2. Faça passar sobre os ombros os tirantes de suporte, cruzando-os.
3. Faça passar os tirantes na presilha A e feche utilizando a fivela. Adapte os tirantes à sua medida utilizando os elementos aderentes.
4. Coloque a faixa de imobilização começando por fixá-la num dos lados com o elemento aderente em B e passe-a à sua volta fixando o outro lado sobre si mesmo.

**Indicações para o médico ou técnico ortopédico**  
O primeiro ajuste do colete ao paciente e os ajustes subsequentes devem ser feitos única e exclusivamente por pessoal especializado que deve seguir as instruções do médico assistente.

Remova a ortese conforme indicado pelo médico assistente.

### INSTRUÇÕES DE USO

#### MEDIDAS (AMBIDEXTRO)

Tamanho único ambidestro.

- Indicações genéricas
- Luxações glenomerais
- Intervenção pós-operatória por Latarjet
- Pós-operatório de fraturas distais e proximais do úmero
- Resultados da cirurgia de reparo do tendão do biceps distal
- Trauma por entorse moderado e grave do ombro

#### INDICAÇÕES

- Em veludo com duas proteções acolchoadas para o pescoço

#### ESTRUTURA FAIXA

- Equipado com uma banda de imobilização em veludo

#### ESTRUTURA DA BOLSA PARA O BRAÇO

- Em algodão com suporte para o cotovelo