

- Il dispositivo si deve indossare tra l'imbofftura e lo scafo
- Il prodotto è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con i prodotti realizzati da FGP S.r.l. CVO-750, CVO-750ECO N, CVO-720, CV-750ECO NP.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata del fabbricante.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.

AVVERTENZE D'USO

CONTRINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

INDICAZIONI: Dispositivo destinato alla pronazione del piede. Utile ad esempio, nei casi di: trattamento riabilitativo del tendine di Achille



Fabbricante

MD

Dispositivo medico

REF

Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco

LOT

Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

 **FGP srl**

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTROVO-730
Rev. 00 - 05/23



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FRONTE



RETRO



CVO-730 KIT

set di 3 cunei di pronazione per tutore walker



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment


ISTRUZIONI PER IL TECNICO ORTOPEDICO

1. Inserire il cuneo in posizione calcaneare sotto all'imbottitura (fig. 1) fissandolo allo scafo mediante il film biadesivo in dotazione.

NOTA:

I cunei possono essere usati in combinata sovrapponendoli nel seguente ordine: 3, 2, 1.

Per fissarli tra loro utilizzare il film biadesivo in dotazione.

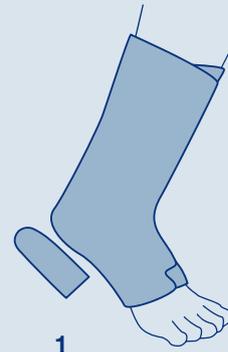

STRUTTURA

- kit composto da 3 cunei di pronazione di 10° ciascuno utilizzabili anche in combinata
- realizzati in gomma sintetica

NOTE

- accessori per CVO-750, CVO-750ECO N, CVO-720, CVO-750ECO NP

MISURE

S	32-38
M	38-43
L	43-48

Codice d'ordine:

CVO-730

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavare a mano utilizzando sapone neutro e risciacquare in acqua fredda.
	Evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, candeggina, ammoniacca, solventi perossidi e sbiancanti ottici.
	Tenere lontano da fonti di calore e sole.
	Non utilizzare asciugatori o macchine asciugatrici.

Lasciar asciugare all'aria.

Evitare l'utilizzo di gomme abrasive, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro e lame di coltello per l'eliminazione delle macchie.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.