




- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata del fabbricante.
- dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il tutore prevede come accessorio il dispositivo CVO-730 avente fabbricante FGP srl.

AVVERTENZE D'USO

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

INDICAZIONI: tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. Utile, ad esempio, nei casi di: distorsioni di caviglia I, II, III grado; esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarsi; trattamento della pseudoartrrosi base V metatarsi; esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale; post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesti di caviglia.

 Fabbricante	 Dispositivo medico	 Codice prodotto	 Conservare lontano da fonti di calore
 Consultare le istruzioni d'uso	 Conservare in ambiente secco	 Codice lotto	 Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

 FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTROV0750ECON
Rev. 12 - 07/23








Orthopedic & Rehabilitation Equipment

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

SMALTIMENTO: non disperdere nell'ambiente.
CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

VERSIONE PNEUMATICA
CVO-750 ECO DELUX



VERSIONE NON PNEUMATICA
CVO-750 ECO SMART



CVO-750 ECO DELUX
CVO-750 ECO SMART

Tutore walker per tibio-tarsica Economy



Orthopedic & Rehabilitation Equipment

- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino gripante all'interno
 - imbottitura pneumatica in tessuto accoppiato con vellutino gripante e all'esterno (versione SMART).
 - kit di imbottiture per aumentare il comfort o rimuovibili
 - plantare traspirante e lavabile in materiale shock-absorbing all'interno e all'esterno (versione DELUX)
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- un unico pezzo composto da scato e guscio in tecnopolimero ad alta resistenza con zone traspiranti
 - suola antiscivolo con conformazione a barca
 - pannello frontale flessibile e removibile
 - protezione delle dita regolabile e removibile
- CHIUSURA**
- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio
- MISURE (ambidestro)**
- | | | |
|---------------|---|-------|
| Taglie | S | 36-40 |
| | M | 40-44 |
| | L | 44-47 |
- Calzata scarpa**
- Altezza** 38 cm
- Codici d'ordine:**
CVO-750ECO NP (SMART, non pneumatico);
CVO-750ECO N (DELUX, pneumatico)

ISTRUZIONI PER L'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE:

INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

1. Rimuovere l'ortesi dall'involucro di plastica, aprire tutti i nastri a strappo delle cinghie e staccare l'imbottitura dalla base.
2. Aprire la chiusura frontale dell'imbottitura. Chiedere al paziente di inserire il piede e il polpaccio nell'imbottitura (fig. 1).
3. Chiudere la chiusura frontale dell'imbottitura (fig. 2).
4. Chiedere al paziente di posizionare il piede nello scafo del tutore all'interno del guscio.
5. In dotazione ci sono dei comodi cuscinetti in materiale espanso che possono essere spostati per aumentare il comfort oppure rimossi per aumentare l'ampiezza mediolaterale tra le aste (fig. 3).
6. Il nastro a strappo all'interno del guscio aderirà all'imbottitura.
7. Posizionare il pannello frontale (fig. 4).
8. Il pannello frontale se necessario è removibile (fig. 5).
9. Stringere le cinghie dell'avampiede (fig. 6).
10. Stringere le cinghie che fissano il polpaccio al guscio, partendo dalla cinghia più vicina alla caviglia (fig. 7).

Chiedere al paziente di camminare con l'ortesi per accertarsi che essa sia stata applicata e funzioni correttamente.

APPLICAZIONI SUCCESSIVE









Se al paziente è consentito rimuovere l'ortesi durante la convalescenza, o se l'ortesi viene rimossa durante una visita medica, è possibile togliere l'ortesi semplicemente aprendo le cinghie e la chiusura frontale della imbottitura. In tal modo, il paziente potrà riapplicare lo stivaletto e l'ortesi con l'adeguato allineamento della gamba.

VERSIONE PNEUMATICA:

Per gonfiare l'imbottitura girare il bottone (fig. A) nella direzione indicata dalla dicitura "INFLATE" fino a chiusura, quindi gonfiare con la pompetta nera (fig. B) fino a quando l'imbottitura risulterà confortevole.

ATTENZIONE: una eccessiva compressione può ridurre la circolazione del sangue.

Per sgonfiare l'imbottitura girare il bottone (fig. A) nella direzione indicata dalla dicitura "DEFLATE" fino a chiusura, l'imbottitura si sgonfia automaticamente, per accelerare lo sgonfiaggio dell'imbottitura premere la pompetta nera.

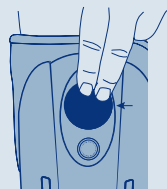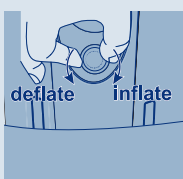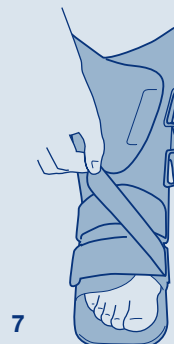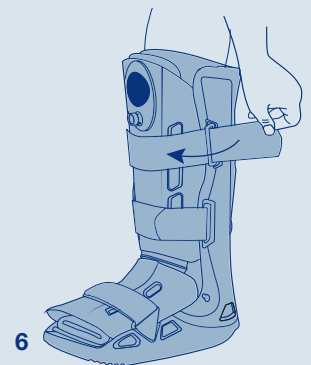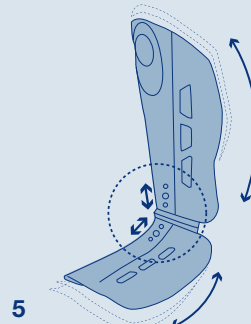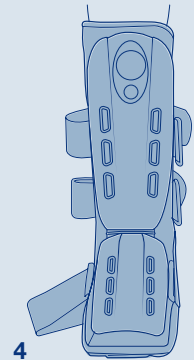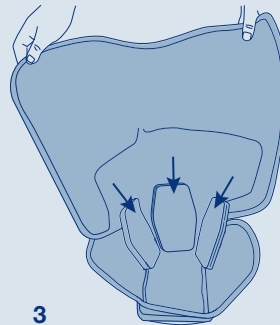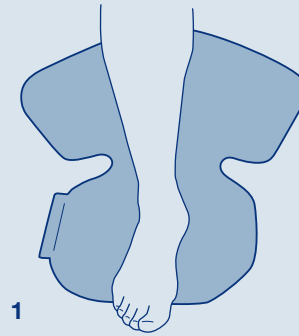

A

B