

Se applicata correttamente non dà luogo a controindicazioni.
Per i soggetti con accertata sensibilità al materiale, è consigliato
l'uso non oltre le cinque ore consecutive.

CONTROINDICAZIONI

Distorsioni di II° e III° grado
Artrosi
Tendiniti
Rieducazione funzionale

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 1 - 05/21

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment




FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

CVO 800 ANKLE STABIL

Cavigliera stabilizzante

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Calzare il tutore in modo che il tallone si collochi perfettamente nell'apertura posteriore dell'ortesi.
2. Chiudere il tutore come una scarpa regolando la larghezza della cavigliera con i lacci.

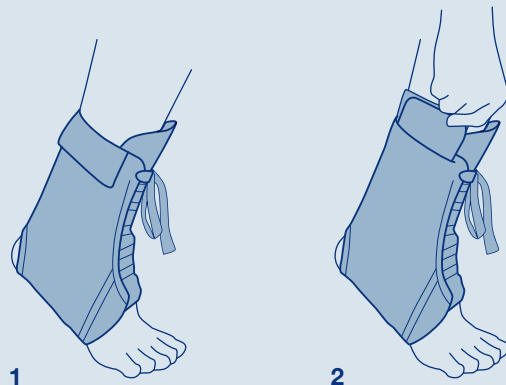

DESCRIZIONE

Cavigliera realizzata in morbido tessuto, con doppia allacciatura per assicurare un'ottima tenuta e stabilità all'articolazione. Dotata di placche malleolari estraibili e modellabili per essere più facilmente adattate in base alle conformità anatomiche del paziente. Apertura posteriore al calcagno e speciale inserzione elastica al tendine d'achille, per evitare pressioni indesiderate.

MISURE

Taglie Calzata scarpa

S	37-40
M	41-42
L	43-44
XL	45-46



MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.