

- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato
- Utilizzare su pelle sana

AVVERTENZE D'USO

Se applicata correttamente non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 3 - 04/20



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)







FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FILAMED® 901

Cavigliera in neoprene con bendaggio
a 8 stabilizzante

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Dopo aver aperto tutte le fasce velcrate, calzare il tutore in modo che il tallone si collochi perfettamente nell'apertura. Chiudere la chiusura frontale velcrata.
2. Tendere il tirante elastico interno, passarlo sul lato opposto del tutore, poi sotto la pianta del piede e in fine chiuderlo sulla fascia di ancoraggio laterale.

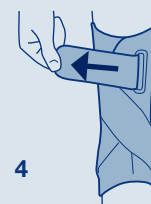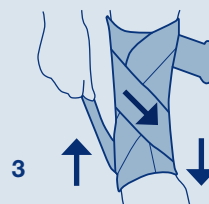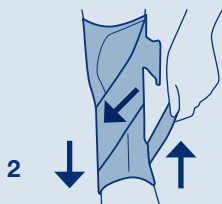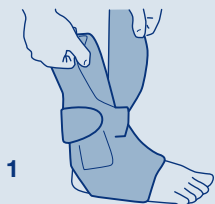

3. Per posizionare l'altro tirante elastico esterno, ripetere la stessa operazione in senso opposto.
4. Far passare il nastro a strappo attraverso la fibbia. Regolare e chiudere definitivamente il velcro attorno alla caviglia.

STRUTTURA

- in neoprene

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata anteriormente
- ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione

MISURE

Taglie Ø Collo del piede

XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



Codice d'ordine
FILAMED 901

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgpsrl.it - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.