



- Utilizzare su cute integra
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/imitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attenderlo il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.





INDICAZIONI: caviglia dolorosa, versamento intrarticolare tibio tarsico, instabilità acute e croniche di caviglia, esito protesi caviglia, recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica, tendinopatie

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

D.T3 CVT
Cavigliera traspirante
con bendaggio ad 8 stabilizzante

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Dopo aver aperto tutte le chiusure a strappo, calzare il tutore in modo che il tallone si collochi perfettamente nell'apertura. Chiudere la chiusura frontale a strappo.
2. Tendere il tirante elastico interno, passarlo sul lato opposto del tutore, poi sotto la pianta del piede e in fine chiuderlo sulla fascia di ancoraggio laterale.

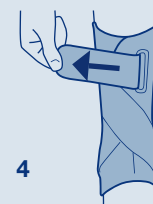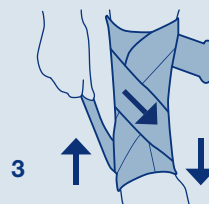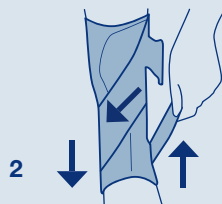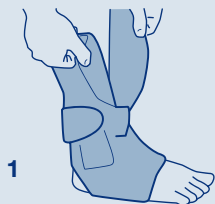

3. Per posizionare l'altro tirante elastico esterno, ripetere la stessa operazione in senso opposto.
4. Far passare il nastro a strappo attraverso la fibbia. Regolare e chiudere definitivamente il nastro a strappo attorno alla cavaglia.

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata anteriormente
- ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

MISURE

Taglie Ø Collo piede

XS	24–26 cm
S	27–29 cm
M	30–32 cm
L	33–35 cm
XL	36–38 cm



Codice d'ordine:
DT3-CVT

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. **Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.



Fabbricante



Dispositivo medico



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco



Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Codice lotto



Uso multiplo singolo paziente