











Equipment

compressiva locale intorno alla rotula (per Filamed® 301). ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione INDICAZIONI: tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del

MD

Dispositivo

medico

Conservare in

Fabbricante

Consultare le

lievi condropatie temoro-rotulee; lievi tendinopatie del rotuleo. moderato; cisti di Baker dolorosa; lievi gonalgie; borsite sovrarotulea; Utile, ad esempio, nei casi di: lievi distorsioni di ginocchio; idrartro o emartro

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione,

ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. APPLICAZIONE: solo per adulti. secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico

∆ AVVERTENZE D'USO

REF

Codice

prodotto

LOT

Codice

Conservare Iontano

da fonti di calore


Uso multiplo

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti territe proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità • La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- del fabbricante.
- e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide. durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo • Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata
- Il tempo necessario al loro completo assorbimento). in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere • Il brodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato

ISTRUZIONI PER L'USO


FII AMFD® 301

- 1. Indossare il tutore come da fig. 1.
- 2. Togliere come da fig. 2.

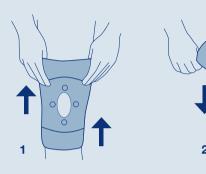

FILAMED® 201

- 1. Indossare il tutore come da fig. 3.
- 2. Togliere come da fig. 4.

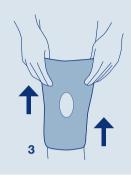



STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con fascia patellare di rinforzo e foro rotuleo (Filamed® 301)
- soft tubolare in neoprene, senza foro rotuleo (Filamed® 201)

SNODO/ASTE

nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360° (Filamed® 301)
- nessuno (Filamed® 201)

CHIUSURA

nessuna

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm



Altezza

5 cm 32 cm

Codici d'ordine:

FILAMED301 FILAMED201

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
×	Non candeggiare
Ø	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
×	Non stirare
Ø	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. **Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al MD, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.