

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto o una limitata durata dello stesso.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attenderne il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

INDICAZIONI: tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di: lievi distorsioni di ginocchio; idratro o ematro moderato; cisti di Baker dolorosa; lievi gonalgie; forste sovrarotulee; lievi condropatie femoro-rotulee; lievi tendinopatie del rotuleo.



Fabbricante



Dispositivo medico



Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco



Codice lotto



Uso multipl
singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISIRFILAMED411
Rev. 02 - 05/23



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FILAMED® 411

GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STABILIZZATORE ROTULEO PERSONALIZZABILE



FGP


Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il tutore come da fig.1.
2. Togliere come da fig. 2.

PER IL TECNICO ORTOPEDICO Istruzioni per la prima applicazione

Regolare e posizionare lo stabilizzatore rotuleo come dà indicazioni contenute nella prescrizione medica. Grazie alle apposite aperture (fig. 3) è possibile far ruotare lo stabilizzatore nella posizione desiderata. Se necessario, con il semplice uso delle forbici è possibile accorciare la lunghezza dello stesso come richiesto.

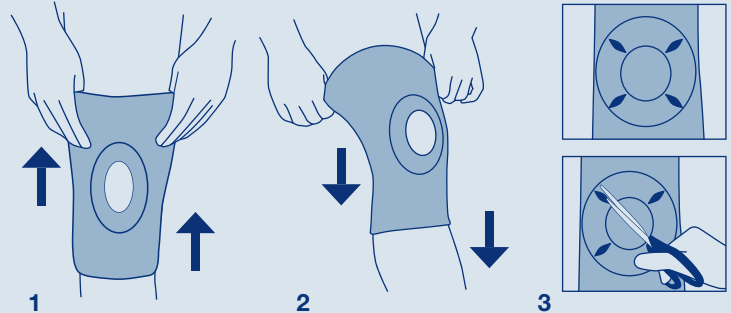

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene con rinforzo nella zona del ginocchio, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- tubetto in spugna ritagliabile e personalizzabile sulle necessità del paziente

CHIUSURA

- nessuna

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Coscia

0°	37-40 cm
1°	40-43 cm
2°	43-45 cm
3°	45-48 cm
4°	48-51 cm
5°	51-56 cm



Altezza

32 cm

Codice d'ordine:
FILAMED411

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.