

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata del fabbricante:
- Evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata del fabbricante.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore destinato alla stabilizzazione ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio, con sistema di contrasto al varismo/valgismo. Utile, ad esempio, nei casi di: modesta instabilità in varo/valgo trauma-tico e non; trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale; trattamento distorsioni di ginocchio o varo/valgo post traumatico;

CONTRINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

 Fabbricante	 Dispositivo medico	 Codice prodotto	 Conservare lontano da fonti di calore
 Consultare le istruzioni d'uso	 Conservare in ambiente secco	 Codice lotto	 Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

 **FGP srl**
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRUHTO
Rev. 02 - 05/23






FGP
 Orthopedic & Rehabilitation Equipment

LIGHT OA

Ginocchiera per osteoartrosi

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. **Smaltimento:** non disperdere nell'ambiente. **Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

Taglie	XXL 65-74 cm
	XL 57-65 cm
	L 51-57 cm
	M 45-51 cm
	S 37-45 cm
	XS 31-37 cm
Taglie	Ø Coscia
MISURE (DX/SX)	
	cinghie posteriori a strappo posizionate fuori dalla regione poplitea
	dotate di scala numerata per la giusta regolazione
	cinghie anteriori di tensionamento a strappo numerate e personalizzabili
	chiusura superiore wrap personalizzabile
CHIUSURA	
	nessuna
STABILIZZATORE ROTULEO	
	arteposta e valva di stabilizzazione
	snodo controlaterale pollicentrico regolabile in allumino con asta superiore
	nel momento di piena estensione del ginocchio
	snodo dinamico brevettato in tecnopolimero che si attiva solo
SNODO/ASTE	
	rete posteriore sul cavo popliteo con copertura interna in morbido tessuto
	silicone interno per una maggiore stabilità
	cuciture piatte e cucitura anteriore/laterale non tibiale
	tessuto Phylo-Touch in nanofibra traspirante con effetto 3D Made in FGP
STRUTTURA	
	tubo con parte superiore a Wrap




Altezza 40 cm
Codici d'ordine:
LIGHT OA VALGO DX; LIGHT OA VALGO SX; LIGHT OA VARO DX; LIGHT OA VARO SX;

ISTRUZIONI PER L'USO

INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

⚠ La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni del tutore devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

1. Prima di far indossare la ginocchiera al paziente, aprire tutte e 4 le cinghie e la parte superiore "wrap" della base in tessuto (non è necessario sfilare le cinghie dai passaggi in tecnopolimero).
2. Adattare le aste dello snodo in alluminio al profilo della gamba del paziente.
3. Con il paziente seduto infilare la ginocchiera, posizionandola con il foro rotuleo e gli snodi in corrispondenza, rispettivamente, della rotula e del centro di rotazione del ginocchio (fig. 1).
4. Chiudere la base in tessuto, sfruttando la doppia patella wrap per un adattamento preciso.
5. Con ginocchio flesso a circa 45°/50°, tensionare leggermente le cinghie posteriori. Le fasce di chiusura non sono numerati per renderli più anonimi possibile al paziente che non dovrà regolarli in seguito (figg. 2-3).
6. Tensionare leggermente le cinghie anteriori nell'ordine della numerazione delle fasce (fig. 4).
7. Far alzare il paziente per verificare la giusta tensionatura delle cinghie.

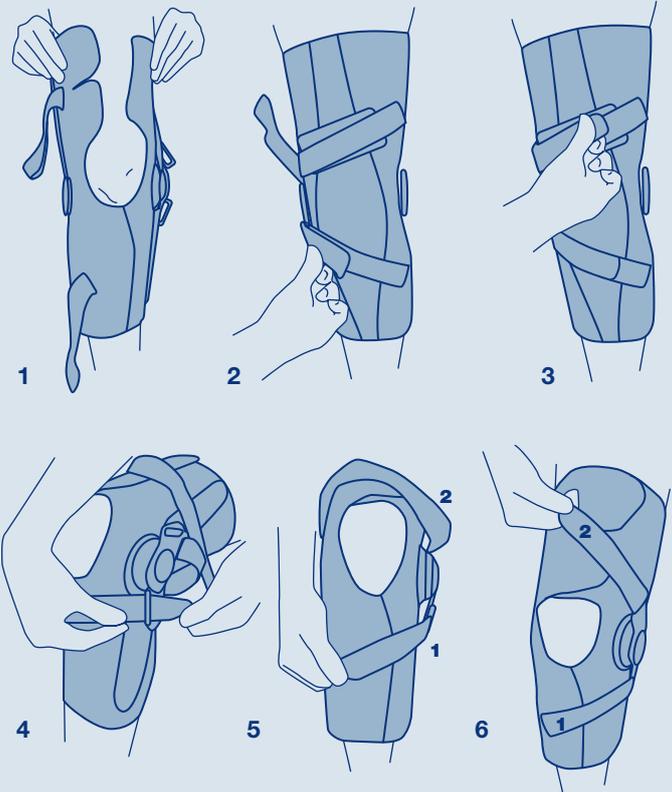

REGOLAZIONI

Ext: -5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Flex: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°

Imm: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

NOTA

Per correggere la spinta in base ad una buona percezione di stabilità e senza eccedere (potrebbe causare fastidio/dolore) è necessario che il paziente sia seduto e con ginocchio flesso a circa 45°/50°. Annotare, per il paziente, il numero risultante sulla scala graduata all'interno del passante in tecnopolimero.

REGOLAZIONE DELLA FLESSO-ESTENSIONE DELLO SNODO

Stop di regolazione in Ext. in colore grigio, Stop in Flex. in colore Nero

La regolazione si effettua SOLO sullo snodo in alluminio controlaterale. Lo snodo dinamico in tecnopolimero, senza stop, ha una estensione auto-limitata a -5° ed una flessione auto-limitata a 150°.



Per la gestione degli stop, è necessario accedere dal lato interno dello snodo, sollevando leggermente il cuscinetto condilare, a ginocchiera non indossata (fig. A).

Per rimuovere uno stop, quando già presente

Svitare la vite che lo trattiene usando il cacciavite in dotazione, dopodiché sfilare lo stop dal suo vano (fig. B).

Per montare uno stop

Infilare lo Stop nel suo vano (fig. B) e serrare la vite che lo trattiene usando il cacciavite in dotazione (fig. A). Non esercitare un serraggio eccessivo.

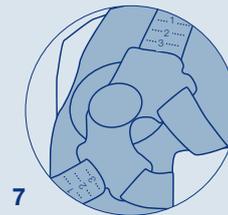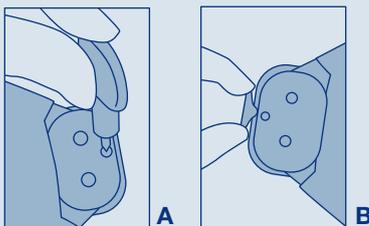

INDICAZIONI PER IL PAZIENTE

1. Aprire solo le cinghie anteriori e la parte superiore "wrap" della base in tessuto.
2. Stando seduti, infilare la ginocchiera posizionandola con il foro rotuleo e gli snodi in corrispondenza, rispettivamente, della rotula e del centro di rotazione del ginocchio (fig. 1).
3. Chiudere la base in tessuto, sfruttando la doppia patella wrap per un adattamento preciso.
4. Con ginocchio flesso a circa 45°/50°, tensionare leggermente le cinghie anteriori nell'ordine della numerazione delle fasce (figg. 5-6).
5. Tensionare le cinghie fino a leggere sulla scala graduata il valore indicato dal tecnico ortopedico (fig. 7).