

INDICAZIONI: tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio. Utile, ad esempio, nei casi di: trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse; coadiuvante nell'attività sportiva nei post operatorio del ginocchio; coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate; prevenzione nella lesione parziale dei crociati.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- I tutori prevedono come accessorio il dispositivo GAP-100 (non è un **MD**)
- avete come fabbricante FGP srl. Tale dispositivo permette di proteggere dagli urti il ginocchio.



 Fabbricante	 Dispositivo medico	 Codice prodotto	 Conservare lontano da fonti di calore
 Consultare le istruzioni d'uso	 Conservare in ambiente secco	 Codice lotto	 Uso multiplo singolo paziente

CE AZIENDA CERTIFICATA ISO 13485:2016

 **FGP srl**
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

FISTR4EVO Rev. 05 - 07/23






Orthopedic & Rehabilitation Equipment

PROTECT 4 EVO PROTECT 4 SHORT






Ginocchiera funzionale a 4 punti lunga e corta per ACL PCL CI con snodo policentrico

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malintenzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortopedico o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

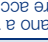Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. NOTA: risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbia di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero (per **PROTECT 4 EVO**) in acciaio (per **PROTECT 4 SHORT**)
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grippante

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZAZIONE ROTULEO

- nussuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili!!!

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Codici d'ordine:
Protect 4 Evo: PRO4-EVO DX; PRO4-EVO SX;
Protect 4 Short: PROTECT4 S DX; PROTECT4 S SX

Altezza



Protect 4 Evo 34 cm
Protect 4 Short 40 cm

INDICAZIONI PER IL TECNICO ORTOPEDICO

REGOLAZIONE DELLA FLESSO/ESTENSIONE E IMMOBILIZZAZIONE

⚠ **Avvertenza importante**

Cambiate o modificate i limiti di estensione o di flessione solo su istruzione del vostro medico o tecnico ortopedico. Per evitare l'iper-estensione inserite sempre inserti di estensione o inserti a 0°. Gli inserti assicurano la corretta escursione dell'ortesi.

Assicuratevi inoltre della corretta posizione dell'ortesi: le parti centrali dell'articolazione devono trovarsi all'altezza della parte superiore della rotula, l'articolazione deve essere posizionata sulla linea mediana laterale della gamba.

⚠ **Fissaggio delle asole delle cinghie per Protect 4 Evo**

Le asole delle cinghie sono fissate sufficientemente e volutamente mobili. Non stringere ulteriormente le viti poiché sono sufficientemente salde. Una forza esagerata applicata sulle viti potrebbe provocare la rottura.

⚠ **Adattamento dell'ortesi**




Nell'adattare l'ortesi, assicurarsi che gli snodi rimangano paralleli. In questo modo si garantisce la corretta funzionalità oltre al movimento scorrevole evitando un'usura precoce.

Inserti di limitazione dell'estensione EXT. (grigi; limiti dell'estensione): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°.

Inserti di limitazione della flessione FLEX. (neri; limite della flessione): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°


Possibilità di immobilizzazione totale a (IMM): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°.

1. L'aggiustamento mediale (interno) e l'aggiustamento laterale (esterno) dei gradi deve essere sempre uguale. Inserti di estensione di 0° e flessione 90° sono già integrati nell'ortesi.
2. Per cambiare gli inserti, allentare le viti del coperchio, togliere il coperchio, allentare le viti degli inserti. Per estrarre facilmente gli inserti, piegate delicatamente la ginocchiera.
3. Gli inserti di estensione (grigi) sono marcati "E" con l'indicazione dei rispettivi gradi. Spingete il nuovo inserto d'estensione tra le due placche e fissatelo con le viti.
4. Scegliete gli inserti di flessione (neri) marcati "F". Spingete il nuovo inserto d'estensione tra le due placche e poi infilate la vite nell'apertura filettata e fissatela a fondo.
5. Piegate e flettete l'articolazione e controllate che gli inserti siano posizionati correttamente. Infine riposizionate il coperchio dell'articolazione.

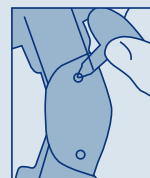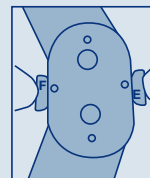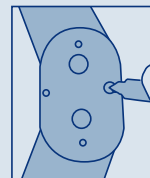

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprite tutte le chiusure a strappo. Sedetevi su una sedia e posizionate l'ortesi sulla gamba in questione; piegate la gamba in modo che formi un angolo di 45°. Posizionate le articolazioni in modo tale che le parti centrali siano messe all'altezza della parte superiore della rotula.
2. Chiudete inizialmente lo strap inferiore anteriore (fig.1), di seguito lo strap superiore posteriore (fig.2).
3. Mantenete il ginocchio in posizione flessa e appoggiate le due articolazioni verso la parte posteriore della gamba. Fissate lo strap superiore posteriore (fig.3) e poi lo strap inferiore anteriore (fig.4).
4. Chiudete lo strap inferiore posteriore (fig.5); e poi lo strap superiore anteriore (fig.6).

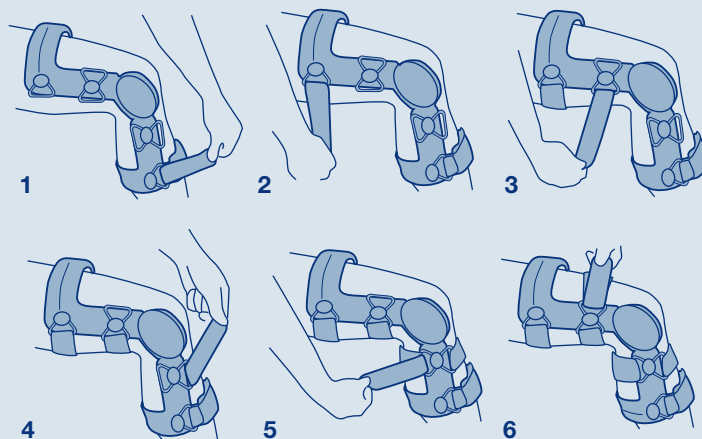

Fate qualche flessione leggera del ginocchio e richiudere tutte le chiusure a fondo, nello stesso ordine, al fine di evitare che l'ortesi scivoli.

COSA FARE QUANDO?

...l'ortesi scivola? Verificate che l'ortesi sia fissata e chiusa correttamente. Il centro dell'articolazione deve essere all'altezza della parte superiore della rotula. Lo strap inferiore posteriore (fig.5) deve essere situato sopra il muscolo del polpaccio. Fate attenzione a eventuali reazioni cutanee; irritazioni cutanee potrebbero insorgere in persone sensibili. Non indossare l'ortesi sopra i vestiti.

...le imbottiture sono consumate? Imbottiture di ricambio possono essere richieste alla ditta FGP srl.

PULIZIA

L'ortesi si può indossare anche in acqua dolce e in acqua salata. Abbiate però cura di risciacquarla in acqua pulita. Lasciate asciugare all'aria. Le battute, i cuscini interni e i cuscinetti condilici sono lavabili a mano in acqua fredda con sapone delicato. Asciugare all'aria. In caso di un normale utilizzo, il meccanismo dell'articolazione non necessita trattamento. In caso di utilizzo in acqua salata, è consigliabile dopo averlo sciacquato accuratamente lubrificarlo con silicone spray. Verificare regolarmente che le viti siano ben fissate; se necessario, riavvitatele. Conservare in luogo fresco e asciutto e non esporre alla luce diretta del sole.