

- Utilizzare sotto la supervisione dei genitori.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore pediatrico destinato all'immobilizzazione delle articolazioni della spalla e del braccio. Utili, ad esempio, nei casi di: lussazioni gleno-omerali, post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero; traumi distorsivi moderati e severi della spalla; trattamento distacchi epifisari composti della testa omale; fratture composte di clavicola.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per bambini.

 Fabbricante	 Dispositivo medico	 Codice prodotto	 Conservare lontano da fonti di calore
 Consultare le istruzioni d'uso	 Conservare in ambiente secco	 Codice lotto	 Uso multiplo singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

 **FGP srl**
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it








FISTRKIDZIMB
Rev. 01 - 03/23



NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

PULIZIA

- in monospugna all'interno e morbido tessuto all'esterno
- la sacca lascia libero il gomito
- dotata di fascia di immobilizzazione con ampia zona gripante
- con chiusura a strappo e ritagliabile a misura grazie alla pinzetta removibile
- dotata di doppia imbottitura a protezione del collo

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO


STRUTTURA CINGHIAGGIO

ISTRUZIONI D'USO

PER IL TECNICO ORTOPEDICO

La prima regolazione del tutore al paziente e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente dal personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

1. Aprire le pinzette di chiusura presenti sulle cinghie di sostegno.
2. Inserire l'avambraccio all'interno della sacca reggibraccio portando le cinghie di sostegno sopra le spalle (fig. 1).
3. Far passare le cinghie sotto la sacca reggibraccio incrociandole sulla parte posteriore del paziente (fig. 2). Chiudere le cinghie fissando le apposite pinzette sulla sacca (fig. 3).
4. Prendere la fascia di immobilizzazione e avvolgerla al tronco in modo da coprire l'arto lesio; si consiglia di avvolgere la fascia prima dal lato dell'arto infortunato chiudendola all'estremità della sacca ed infine richiuderla su se stessa (fig. 4).
5. Per rimuovere il tutore, staccare le pinzette delle cinghie dalla sacca e sfilare il tutore dal braccio.

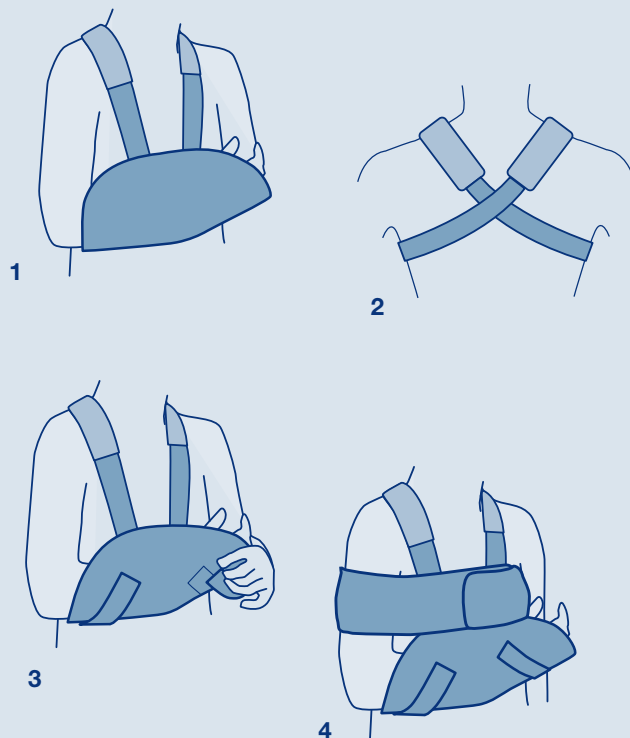

PER IL TECNICO ORTOPEDICO O MEDICO CURANTE

Nel caso in cui la lunghezza delle cinghie di sostegno siano eccessive, è possibile regolare il tutore: rimuovere le pinzette, tagliare parte delle due cinghie in base alla necessità, applicare nuovamente le pinzette sulle cinghie e chiudere le pinzette attorno alle cinghie di sostegno.

MISURE (ambidestro)

Taglie Lungh. avambraccio

1° fino a 25 cm

2° 25-30 cm

