

- Utilizzare sotto la supervisione dei genitori.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una mailletta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: tutore pediatrico destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della spalla. Utile, ad esempio, nei casi di: trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico); lussazioni acromion clavari.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni.

APPLICAZIONE: solo per bambini.

 Fabbricante	 Dispositivo medico	 Codice prodotto	 Conservare lontano da fonti di calore
 Consultare le istruzioni d'uso	 Conservare in ambiente secco	 Codice lotto	 Uso multiplio singolo paziente

 AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

 **FGP srl**
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRKIDZRDS
Rev. 01 - 03/23



 **KIDZ**



KIDZ-RDS


Immobilizzatore clavicolare pediatrico

ISTRUZIONI D'USO

1. Sganciare le pinzette presenti nel cinghiaggio spalla dall'imbottitura spalla (fig. 1).
2. Indossare l'immobilizzatore posizionando la parte A nella zona interscapolare e portare i tiranti B e C sopra le spalle (fig. 2).
3. Far passare nella parte ascellare i tiranti B e C, infilarli nelle rispettive fibbie, quindi girarli su se stessi e chiudere tramite le rispettive pinzette (fig. 3).
4. Per rimuovere il tutore staccare le pinzette dall'imbottitura spalla e sfilare i tiranti dalle spalle.

PER IL TECNICO ORTOPEDICO O MEDICO CURANTE

Nel caso in cui la lunghezza dei tiranti sia eccessiva per il paziente, è possibile regolare il tutore: rimuovere le pinzette dai tiranti B e C, tagliare parte dei tiranti in base alla necessità, applicare nuovamente le pinzette e chiuderle attorno ai tiranti stessi.

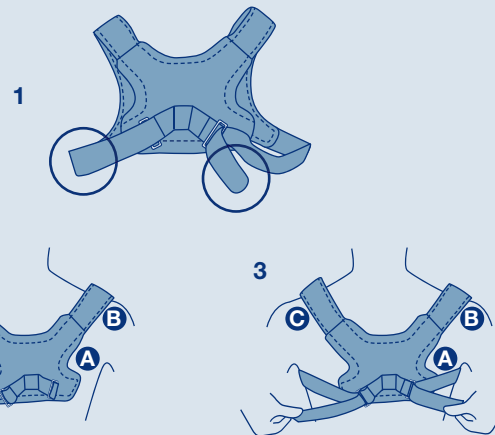

STRUTTURA BASE

- pannello posteriore interscapolare in materiale traspirante a contatto pelle, dotato di imbottitura e pannello di irrigidimento in polietilene all'interno
- cinghiaggio spalla in morbido materiale con monospugna all'interno e parte terminale in materiale a strappo removibile e ritagliabile a misura grazie alle pinzette removibili

MISURE

Taglie	Ø Torace
1°	58-70 cm
2°	70-82 cm



Codice d'ordine:
KIDZ-RDS

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.