



- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

INDICAZIONI PHYLO® 20: lievi condropatie femoro-rotulee; lievi tendinopatie del rotuleo; lievi distorsioni di ginocchio; idrarto o emarto moderato; cisti di Baker dolorosa; lievi gonalgie.

INDICAZIONI PHYLO® 40-41: moderata o grave condropatie femoro-rotulee; lievi tendinopatie del rotuleo; lieve artrosi femoro-rotulea; esiti lussazioni rotulee.


CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

PHYLO® 20-40-41

GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON FORO ROTULEO
O STABILIZZATORE ROTULEO

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il tutore come da figura 1.
2. Togliere come da figura 2.

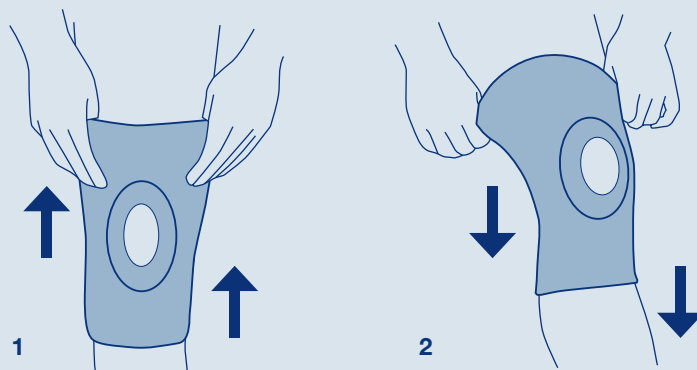

STRUTTURA

- soft in tessuto Phyllo traspirante con rete posteriore, tubolare e foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- **Phyllo 20:** nessuno;
- **Phyllo 40:** in silicone ad anello
- **Phyllo 41:** in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360° con tasca

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH.

MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



Altezza

Phyllo 20: 25 cm
Phyllo 40: 25 cm
Phyllo 41: 34 cm

Codice d'ordine

PHY-20
PHY-40
PHY-41

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. **Smaltimento:** non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.



NOTA: Questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.