

Joelheira aberta e fechada, com material respirável e com hastes em espiral



Rev. 4 - 06/21

AVISOS DE USO

- Use na pele intacta.
- Se houver feridas, proteja de acordo com as indicações médicas.
- Não use em caso de desgaste, rutura ou não integridade do material.
- A embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
- A modificação / alteração do dispositivo médico exclui qualquer responsabilidade ao fabricante.
- Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, é aconselhável prevenir / limitar o contato do aparelho com cremes, óleos, loções ou substâncias gordurosas ou ácidas.
- Não modifique os ajustes feitos pelo médico ou técnico ortopédico no MD para não causar perda de funcionalidade do produto
- O produto não inclui acessórios e não foi projetado para ser usado em combinação com outros MDs (ex: em caso de aplicação de cremes aguardar o tempo necessário para a completa absorção).



EMPRESA CERTIFICADA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

FGP srl

Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



Distribuído em Portugal por:  
medi Bayreuth, Unip., Lda  
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa  
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33  
mail: medl.portugal@medibayreuth.pt / internet: www.medl.pt

**NOTA:** este dispositivo médico de classe I deve ser utilizado com as devidas advertências relacionadas nestas instruções, em conjunto com aquelas fornecidas pelo técnico ortopédico ou médico, que fazem parte integrante do mesmo. Para qualquer alegado problema decorrente do uso do dispositivo, entre em contato com o médico assistente ou técnico ortopédico. Em caso de reclamações ou avarias, contacte a empresa FGP Srl indicando os motivos para o número de telefone 045 8600867 ou envie um e-mail para fgpsrl@fgpsrl.it. A órtese é feita para uso exclusivo de um único paciente. Em caso de acidente grave, morte ou grave deterioração das condições de saúde do paciente, relacionadas ao MD, entre imediatamente em contato com o fabricante e a autoridade competente.

**CONSERVAÇÃO:** conservar em local seco, à temperatura ambiente. Proteger do calor, da exposição solar direta e da humidade. **Descarte: não deite no meio ambiente. O produto pode ser depositado no contedor de lixo comum ou indiferenciado.**

SIMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem normal à mão a uma temperatura máxima de 30 ° com sabão neutro. Enxaguar abundantemente.
	Não usar branqueadores.
	Não secar na máquina.
	Não passar a ferro.
	Não limpar a seco.


MANUTENÇÃO

**DESTINO DO DISPOSITIVO MÉDICO MD** adjuntante no tratamento de esta dos patológicos de natureza ortopédica do membro inferior.

**CONTRA-INDICAÇÕES:** não conhecidas até ao momento. A aplicação correta de acordo com as indicações fornecidas pelo médico assistente ou técnico ortopédico, não dá origem a contra-indicações.

**APLICAÇÃO:** apenas para adultos.

INSTRUÇÕES DE USO

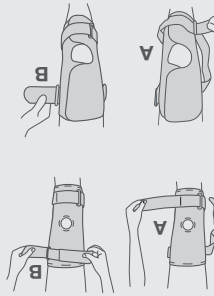


1. Abra todas as tiras de abertura e fecho e coloque a ortese puxando ao longo da perna.
  2. Coloque de forma a que a abertura rotular fique posicionada exatamente sobre a rótula.
  3. Finalmente feche a tira de abertura e fecho inferior "A" e depois a superior "B".
1. Abra todas as tiras de abertura e fecho e da abertura frontal.
  2. Fechar a parte inferior e superior os elementos aderentes da abertura frontal.
  3. Finalmente feche a tira de inferior "A" e depois a superior "B".

PHYLO® 60

PHYLO® 61

MEDIDAS

Tamanho	Ø Coxa
XXL	65-74 cm
XL	57-65 cm
L	51-57 cm
M	45-51 cm
S	37-45 cm
XS	31-37 cm

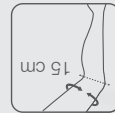

ALTA  
PHYLO® 60 34 cm  
PHYLO® 61 34 cm

**INDICAÇÕES**  
PHYLO® 60: condropatia patelofemoral moderada ou grave; tendinopatias patelofemoral pós-traumática; Distúrbio joelho; artrose patelofemoral leve; luxações patelares e / ou entorses de joelho; instabilidade pós-traumática leve.

**FECHO:** por meio de duas tiras ajustáveis com sistema de abertura e fecho (Phylo® 61 não contém) nota: o material foi submetido a um tratamento termo-regulador SMART TEMP e a um tratamento para dar uma maior sensação de frescura FRESH

**ESTABILIZADOR DE RÓTULA:** em espuma de poliuretano, com forma de meia-lua que pode ser girada 360 ° e com sistema destacável (Phylo® 61 não contém)

**JUNTA / HASTES:** talas espirais duplas latero-mediais políteia, formato tubular, com orifício patelar (Phylo® 61 totalmente aberto)

**ESTRUTURA:** tecido Phylo® macio e respirável, com malha de rede na zona