

- Utilização em pele intacta.
- Se presentes feridas, proteger conforme as indicações médicas.
- Não utilizar em caso de desgaste, ruptura ou não integridade do material.
- A embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
- A modificação/alteração do dispositivo médico exclui todas as responsabilidades do fabricante.
- Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, recomenda-se evitar/limitar o contacto entre o dispositivo e cremes, óleos, loções ou substâncias gordurosas ou ácidas.
- O produto não prevê acessórios e não foi concebido para ser utilizado em combinação com outros **DM** (por ex., no caso de aplicação de cremes, aguarde o tempo necessário para a sua absorção completa).

#### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**CONTRAINDICAÇÕES:** no momento, sem registo. A aplicação correta, de acordo com as indicações precisas fornecidas pelo médico assistente ou técnico de ortopedia, não dá origem a contraindicações. **APLICAÇÃO:** apenas para adultos.

**INDICAÇÕES:** protecção destinada à estabilização da articulação do joelho por compressão de tecidos moles, com rolagimento de ação compressiva local ao redor da patela. Util, por exemplo, nos casos de: condropatias femoropatetales moderadas no graves; tendinopatias leves; artrose femoropatetales leve; resultados de luxações patetales.



Fabricante

**MD**

Dispositivo médico

**REF**

Código do produto



Guarde longe de fontes de calor



Consulte as instruções de utilização



Guarde em local seco

**LOT**

Código do lote



Utilização múltipla num único paciente



EMPRESA CERTIFICADA  
ISO 13485:2016



FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRPORTPYTK20/40/41  
Rev. 01 - 06/23



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment


**PHYLOETEK**



# PHYLOETEK 40

Linha PhyloEtek - Joelheira respirável com orifício na rótula e estabilizador na rótula

1. Enfie a joelheira na perna lesionada, como na figura 1, de modo que a zona com silicone dentro da proteção esteja posicionada na parte superior da perna.
2. Posicione a proteção de tal forma que o orifício patelar seja colocado exatamente na patela (fig. 1).
3. Remova a joelheira extraíndo-a conforme na figura 2.

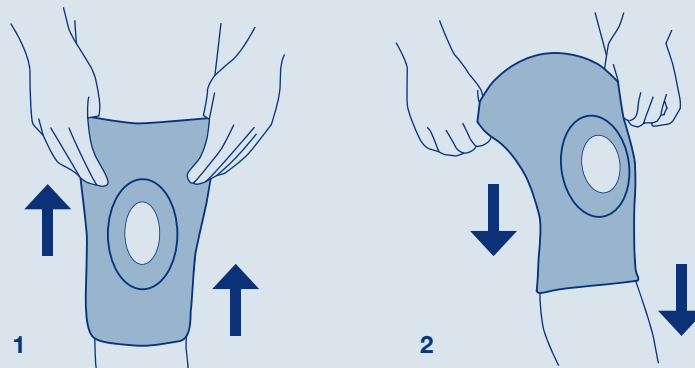

## ESTRUTURA

- macia de tecido PhyloEtek® respirável sem costuras com espessura reduzida, trama diferenciada na zona do popliteo, tubular, com orifício patelar.

## ARTICULAÇÃO / HASTES

- nenhum

## ESTABILIZADOR ROTULIANO

- em anel de silicone

## FECHO

- nenhum

## NOTAS

- bolsa para estabilizador feita diretamente do quadro

## MEDIDAS (ambidestro)

### Tamanho Ø Coxa

XS	34–40 cm
S	40–46 cm
M	46–52 cm
L	52–58 cm
XL	58–65 cm
XXL	65–72 cm



**Altura**  
25 cm

**Código de encomenda:**  
EPY-TK40

## LIMPEZA

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem à mão. NOTA: lavagem à mão normal à temperatura máxima de 30° com sabão neutro. Passar bem por água
	Não branquear
	Não secar na máquina de lavar roupa de tambor rotativo
	Não engomar
	Não lavar a seco

**ARMAZENAMENTO:** armazenar em local seco à temperatura ambiente.

Proteja do calor, da exposição direta à luz solar e da humidade. **Eliminação: não disperse no ambiente. O produto pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.**

**NOTA:** Este dispositivo médico de Classe I deve ser utilizado com as devidas precauções referidas nestas instruções, em combinação com as fornecidas pelo técnico ortopédico ou pelo médico assistente, que fazem parte integrante da mesmas. Para todas as eventuais problemáticas surgidas em consequência da utilização do dispositivo, dirija-se ao médico assistente ou ao técnico de ortopedia. Em caso de reclamações ou alegados maus funcionamentos, queira dirigir-se ao revendedor junto do qual foi adquirido o produto. A ortótese é fabricada para utilização exclusiva num único paciente. Em caso de acidente grave, morte ou deterioração grave do estado de saúde do doente, relacionáveis com o **DM**, contacte imediatamente o fabricante e a autoridade competente.

**Distribuído em Portugal por:** medi Bayreuth, Unip., Lda  
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa  
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33  
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt /internet: www.medi.pt