

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI PHYLOTEK 20: tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli. Utile, ad esempio, nei casi di: levi condropatite femoro-rotulee; levi tendinopatie del rotuleo; cisti di Baker dolorosa; levi gonalgie.

INDICAZIONI PHYLOTEK 40-41: tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di: moderata o gravi condropatite femoro-rotulee; levi tendinopatie del rotuleo; levi artrosi femoro-rotulee; estri lussazioni rotulee.

CONTRAINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante



Dispositivo medico



Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco



Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



F.G.P. s.r.l. unipersonale
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRPHYT20/40/41
Rev. 02 - 07/24




Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



PHYLOTEK 41



PHYLOTEK 40

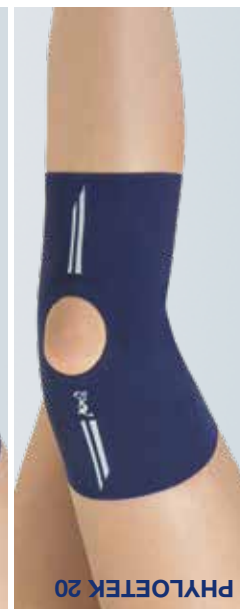

PHYLOTEK 20



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment


PHYLOTEK



PHYLOTEK
20-40-41

Linea PhyloEtek - Ginocchiera traspirante
con foro rotuleo e/o stabilizzatore rotuleo

1. Infilare la ginocchiera nella gamba infortunata come in figura 1 in modo che la zona siliconata presente all'interno del tutore sia posizionata nella parte superiore della gamba.
2. Posizionare il tutore in modo tale che il foro rotuleo sia posto esattamente sulla rotula (fig. 1).
3. Rimuovere la ginocchiera sfilandola come da figura 2.

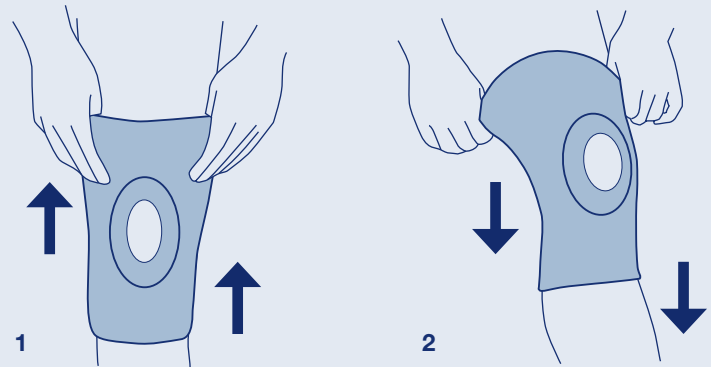

STRUTTURA

- soft in tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- **PhyloEtek 20**: nessuno;
- **PhyloEtek 40**: in silicone ad anello;
- **PhyloEtek 41**: a forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- tasca per stabilizzatore realizzata direttamente dal telaio (per **PhyloEtek 40**)

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Coscia

XS	34–40 cm
S	40–46 cm
M	46–52 cm
L	52–58 cm
XL	58–65 cm
XXL	65–72 cm



Altezza

PhyloEtek 20 :	25 cm
PhyloEtek 40 :	25 cm
PhyloEtek 41 :	34 cm

Codici d'ordine:

PY-TK20
PY-TK40
PY-TK41

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE:

conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.