



POSTURE PLUS SYSTEM

Il nostro ingegno parla italiano, e comunica a tutti la lingua universale del benessere. E a tutti dedichiamo la nostra tecnologia, la nostra ricerca, e le soluzioni più innovative nel campo della riabilitazione nate dal dialogo costante con i più autorevoli professionisti del settore ortopedico e riabilitativo. Perché per noi di FGP, star bene è un diritto di tutti, e migliorare la vita di tutti è un impegno.

Da questo impegno nasce POSTURE PLUS SYSTEM: una soluzione di maglie e partizioni posturali che, grazie alla sinergia tra fasce di trazione anelastiche e tessuti elastici confortevoli e performanti, stimola impulsi propriocettivi per ridurre alla corretta postura.

POSTURE PLUS SYSTEM è una proposta di abbigliamento frutto dell'innovazione, esperienza e tecnologia FGP, completamente Made in Italy perché confezionate qui, nella nostra struttura e nei nostri impianti, per un benessere dedicato a tutti.



PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortopedico o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al MD, o in caso di incidente grave, morte, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

CE AZIENDA CERTIFICATA ISO 13485:2016

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

FISTRAPSTECH
Rev. 07 - 02/23

Fabbricante

Dispositivo medico

Codice prodotto

Conservare lontano da fonti di calore

Consultare le istruzioni d'uso

Conservare in ambiente secco

Codice lotto

Uso multiplo singolo paziente

INDICAZIONI: tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, scapolare; cervicobrachialigie; ipotono/rotta della muscolatura del tronco; contratture muscolari del trapezi, dei medializzatori delle scapole; coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann;

CONTRAINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).



POSTURE PLUS SYSTEM

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia del "capo integrale" ovvero una assenza totale di cuciture per un comfort e vestibilità ottimali; il filato usato "Nilit Breeze®" garantisce la sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- zona pettorale e sottoascellare a rete

CHIUSURA

- senza zip

MISURE UNISEX

Taglie Ø Seno/Torace

XS	80-88 cm
S	88-96 cm
M	96-104 cm
L	104-112 cm
XL	112-122 cm



Codici d'ordine:

PPS-TECH B (bianca)

PPS-TECH N (nera)

RIALLINEAMENTO PORZIONE TRONCO-LOMBARE



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Durante l'indosso e nel togliere la t-shirt accompagnare sempre il capo come rappresentato nella seguente sequenza di immagini.
2. Inserire le mani nelle maniche (fig.1), accompagnarle fino alla zona delle spalle (fig. 2, 3, 4, 5, 6) e successivamente infilare la testa e sistemare lungo il busto (fig. 7).
3. Per sfilare la maglia procedere come nelle figure 8, 9, 10, 11, accompagnando sempre il capo.

Prima di indossare il capo togliere anelli, bracciali e qualsiasi cosa possa danneggiare il tessuto.

