



P+ FORCE
P+ EFFECT
P+ PERFECT ZIP
P+ YOUNG UP
P+ YOUNG EASY UP
 Maglia posturale

POSTURE PLUS SYSTEM

Il nostro ingegno parla italiano, e comunica a tutti la lingua universale del benessere. E a tutti dedichiamo la nostra tecnologia, la nostra ricerca, e le soluzioni più innovative nel campo della riabilitazione nate dal dialogo costante con i più autorevoli professionisti del settore ortopedico e riabilitativo. Perché per noi di FGP, star bene è un diritto di tutti, e migliorare la vita di tutti è un impegno.

Da questo impegno nasce POSTURE PLUS SYSTEM: una soluzione di maglie e pantaloni posturali che, grazie alla sinergia tra fasce di trazione anelastiche e tessuti elastici confortevoli e performanti, stimola impulsi propriocettivi per ridurre alla corretta postura.

POSTURE PLUS SYSTEM è una proposta di abbigliamento frutto dell'innovazione, esperienza e tecnologia FGP, completamente Made in Italy perché confezionate qui, nella nostra struttura e nei nostri impianti, per un benessere dedicato a tutti.


AZIENDA CERTIFICATA
 ISO 13485:2016

 **FGP srl**
 Via Alessandro Volta 3
 I-37062 Dossobuono VR
 T +39 0458600867
 F +39 0458600835
 www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it





FISTRAPPS
 Rev. 12 - 08/23

-  **Fabbricante**
-  **Dispositivo medico**
-  **Codice prodotto**
-  **Conservare lontano da fonti di calore**
-  **Consultare le istruzioni d'uso**
-  **Conservare in ambiente secco**
-  **Codice lotto**
-  **Uso multiplo singolo paziente**

RIALLINEAMENTO PORZIONE TRONCO-LOMBARE



POSTURA ERRATA
POSTURA CORRETTA

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** per adulti e bambini.

- AVVERTENZE D'USO**
- Utilizzare su cute integra
 - Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
 - Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
 - La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
 - La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
 - Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
 - Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).






NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al MD, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

Conservazione: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smatimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

P+ FORCE

STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabric associato a fasce di tensionamento toraco-dorsali in materiale anelastico
- rete traspirante nella zona sottoascellare
- rifinita con silicone sul bordo inferiore e strisce a livello scapolare

CHIUSURA

con zip

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio: dorso curvo non strutturato; iperlordosi non strutturata; patologie spalla con compenso scapolare; cervicobrachialgie; ipotonotrofia della muscolatura del tronco; contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole; coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali; coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato; esiti fratture clavicolari.

Codice d'ordine:

PXT-SHIRTW (colore nero donna); PXT-SHIRT M (colore nero uomo)
PXT-SHIRT B W (colore bianco donna); PXT-SHIRT B M (colore bianco uomo)

MISURE DONNA

Taglie	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



MISURE UOMO

Taglie	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



P+ EFFECT / P+ PERFECT ZIP

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- senza zip (P+ EFFECT)
- con zip (P+ PERFECT ZIP)

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio: dorso curvo non strutturato; patologie spalla con compenso scapolare; cervicobrachialgie; ipotonotrofia della muscolatura del tronco; contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole; coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann; coadiuvante nella correzione di vizi posturali.

Codice d'ordine:

PPS-EFFECT B (bianca); PPS-EFFECT N (nera)
PPS-PZIP B (bianca); PPS-PZIP N (nera)

MISURE (UNISEX)

Taglie	Ø Seno/Torace
1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm



P+ YOUNG UP

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- con zip

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio: dorso curvo non strutturato; patologie spalla con compenso scapolare; cervicobrachialgie; ipotonotrofia della muscolatura del tronco; contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole; coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann; coadiuvante nella correzione di vizi posturali.

Codice d'ordine:

PPS-YOUNG UP B (bianca); PPS-YOUNG UP N (nera)

P+ YOUNG EASY UP

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- senza zip

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio: dorso curvo non strutturato; patologie spalla con compenso scapolare; cervicobrachialgie; ipotonotrofia della muscolatura del tronco; contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole; coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann; coadiuvante nella correzione di vizi posturali.

Codice d'ordine:

PPS-YOUNG EASY UP B (bianca); PPS-YOUNG EASY UP N (nera)

MISURE (UNISEX)

YOUNG UP E YOUNG EASY UP

Taglie	Ø Torace
1°	60-67 cm
2°	67-74 cm
3°	74-80 cm



ISTRUZIONI PER L'USO P+ FORCE



⚠ Per P+ FORCE prima di indossare il dispositivo rimuovere le pellicole protettive interne, collocate sulle fasce di tecnopolimero anti-scivolo in prossimità delle spalle.