

MEZZA SOLETTA METAPLANTARE IN SILICONE CON SCARICO CALCANEARE

SOLETTA PRT-S04

INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno metaplantare.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- ▷ lieve tallonite
- ▷ lieve dolore plantare
- ▷ fascite plantare lieve



MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35-37
M	38-40
L	41-44



MEZZA SOLETTA METAPLANTARE IN SILICONE CON SCARICO CALCANEAIRE

TIPOLOGIA

▷ Mezza soletta


STRUTTURA

- ▷ Silicone con bordi stabilizzanti
- ▷ Scarico ad oliva per zona calcaneare

CODICE D'ORDINE: PRT-S04

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collocare le solette nelle scarpe. Se necessario, rimuovere le solette eventualmente già presenti per ottenere la giusta aderenza.
2. Accertarsi di inserire una sola soletta in ciascuna scarpa, eccezion fatta per correzioni di arti inferiori di diversa lunghezza.
3. Le solette in silicone possono essere utilizzate con scarpe normali, sportive, per il tempo libero o anche scarpe da lavoro.

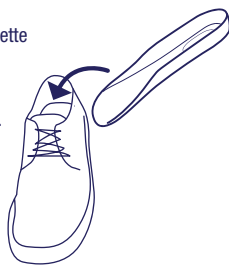

CONTROINDICAZIONI

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni.

APPLICAZIONE: solo per adulti.

PULIZIA

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro.

Lasciare asciugare bene.

Non mettere ad asciugare sui caloriferi.

AVVERTENZE D'USO

- Dispositivo ad uso esclusivamente personale.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il dispositivo deve essere indossato con una calza.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

CONSERVAZIONE

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. 
Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.



NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

 **FGP srl**

Via Alessandro Volta 3 I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867 - F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016