

# TALLONIERA IN SILICONE CON ZIGRINATURA

---


## TALLONIERA PRT-S06

### INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno calcaneare.

Utile, ad esempio, nei casi di:

▷ tallonite

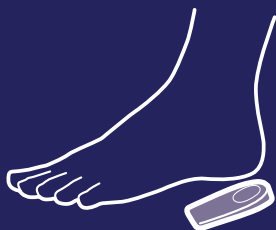

### MISURE (ambidestro)

| Taglie | Calzata scarpa |
|--------|----------------|
|--------|----------------|

|   |       |
|---|-------|
| S | 35-37 |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| M | 38-40 |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 41-44 |
|---|-------|



# TALLONIERA IN SILICONE CON ZIGRINATURA

## TIPOLOGIA

▷ Talloniera

## STRUTTURA

▷ Silicone zigrinato

▷ Scarico ad oliva per la zona calcaneare

**CODICE D'ORDINE:** PRT-S06

## ISTRUZIONI PER L'USO

Collocare il cuscinetto nell'area del tallone delle scarpe.



## CONTROINDICAZIONI

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni.

**APPLICAZIONE:** solo per adulti.

## PULIZIA

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro.

Lasciare asciugare bene.

Non mettere ad asciugare sui caloriferi.

## AVVERTENZE D'USO

- Dispositivo ad uso esclusivamente personale.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il dispositivo deve essere indossato con una calza.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

## CONSERVAZIONE

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.   
Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.



**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

 **FGP srl**

Via Alessandro Volta 3 I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867 - F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016