

PROTEZIONE IN SILICONE PER ALLUCE VALGO

PROTEZIONE PRT-S14

INDICAZIONI

Tutore destinato al sostegno metatarsale.

Utile, ad esempio, nei casi di:

▷ borsite dolorosa della metatarsofalangea dell'alluce

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa
--------	----------------

1°	35-39
----	-------

2°	40-46
----	-------



PROTEZIONE IN SILICONE PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

▷ Protezione

STRUTTURA

▷ Silicone tubolare con anello di stabilizzazione

CODICE D'ORDINE: PRT-S14

ISTRUZIONI PER L'USO

Infilare l'alluce nell'apposito anello, in modo che il cuscinetto risulti posizionato sui punti particolarmente sottoposti a sollecitazioni. Utilizzare su epidermide asciutta e pulita.

CONTROINDICAZIONI

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

PULIZIA

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro. Lasciare asciugare bene. Non mettere ad asciugare sui caloriferi.

AVVERTENZE D'USO



- Dispositivo ad uso esclusivamente personale.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

CONSERVAZIONE

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.



Fabbricante



Consultare le istruzioni d'uso



Codice prodotto



Codice lotto



Dispositivo medico



Conservare in ambiente secco



Conservare lontano da fonti di calore



Uso multiplo singolo paziente

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

 **FGP srl**

Via Alessandro Volta 3 I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 - F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016