

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO

PRO_HALLUX PRT-S15N DX

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- ▷ esiti intervento di De Prado all'alluce
- ▷ alluce valgo lieve
- ▷ borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- ▷ iniziale alluce rigido doloroso

MISURE - Taglie/Calzata scarpa

S 36-38; M 38-42; L 42-44; XL oltre 44



CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

▷ Correttore

STRUTTURA

▷ In tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione.

CODICE D'ORDINE: PRT-S15N

ISTRUZIONI PER L'USO

Prendere il tutore e verificare la correttezza della taglia e del verso.

Rimuovere la pellicola protettiva presente sopra il materiale antiscivolo ovale.

Calzare attraverso l'apertura (fig. 1).

Posizionare l'alluce nell'apposita sede e il cinturino sul tallone (figg. 2 e 3).

CONTROINDICAZIONI

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

PULIZIA

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro.


Lasciare asciugare bene.

Non mettere ad asciugare sui caloriferi.

AVVERTENZE D'USO



- Dispositivo ad uso esclusivamente personale.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una calza.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

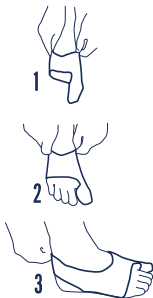

CONSERVAZIONE

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.



Fabbricante



Consultare le
istruzioni d'uso



Codice
prodotto



Codice lotto



Dispositivo
medico



Conservare in
ambiente secco



Conservare lontano
da fonti di calore



Uso multiplo
singolo paziente

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

 **FGP srl**

Via Alessandro Volta 3 I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867 - F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016