

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO

PRO_HALLUX PRT-S15N SX

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- ▷ esiti intervento di De Prado all'alluce
- ▷ alluce valgo lieve
- ▷ borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- ▷ iniziale alluce rigido doloroso

MISURE - Taglie/Calzata scarpa

S 36-38; M 38-42; L 42-44; XL oltre 44



CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

▷ Correttore

STRUTTURA

▷ In tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione.

CODICE D'ORDINE: PRT-S15N

ISTRUZIONI PER L'USO

Prendere il tutore e verificare la correttezza della taglia e del verso.

Rimuovere la pellicola protettiva presente sopra il materiale antiscivolo ovale.

Calzare attraverso l'apertura (fig. 1).

Posizionare l'alluce nell'apposita sede e il cinturino sul tallone (figg. 2 e 3).

CONTROINDICAZIONI

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

PULIZIA

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro.


Lasciare asciugare bene.

Non mettere ad asciugare sui caloriferi.

AVVERTENZE D'USO



- Dispositivo ad uso esclusivamente personale.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una calza.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

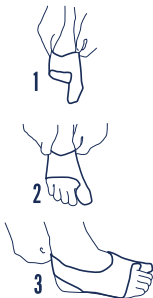

CONSERVAZIONE

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.



Fabbricante



Consultare le
istruzioni d'uso

REF

Codice
prodotto

LOT

Codice lotto

MD

Dispositivo
medico



Conservare in
ambiente secco



Conservare lontano
da fonti di calore



Uso multiplo
singolo paziente

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

 **FGP srl**

Via Alessandro Volta 3 I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867 - F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016