

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO

HALLUX_MED PRT-S16 DX

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- ▷ esiti intervento di De Prado all'alluce
- ▷ alluce valgo lieve
- ▷ borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- ▷ iniziale alluce rigido doloroso



MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	oltre 42



DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

▷ Correttore


STRUTTURA

▷ In tecnopolimero con sistema di fissaggio mediante 2 cinturini a strappo

CODICE D'ORDINE: PRT-S16

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Utilizzare su epidermide asciutta e pulita.
2. Aprire i nastri a strappo (fig. 1).
3. Posizionare la struttura in plastica tra l'alluce ed il secondo dito, allungare e posizionare il cinturino bianco imbottito attorno all'alluce (fig. 2). Successivamente, far ruotare il cinturino attorno all'alluce - sotto la parte dentellata del tutore - e chiudere con l'apposito cinturino a strappo (fig. 3).
4. Chiudere il cinturino sulla parte laterale del piede.

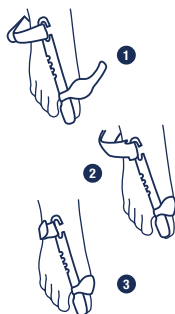

CONTROINDICAZIONI

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni.

APPLICAZIONE: solo per adulti.

PULIZIA

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro.

Lasciare asciugare bene.

Non mettere ad asciugare sui caloriferi.

AVVERTENZE D'USO

- Dispositivo ad uso esclusivamente personale.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

CONSERVAZIONE

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. 
Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.



NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

 **FGP srl**

Via Alessandro Volta 3 I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867 - F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016