

FASCIA DI PROTEZIONE CON CUSCINETTO ANATOMICO

PRT-S22

INDICAZIONI

▷ Alluce valgo

MISURE

Taglia unica



FASCIA DI PROTEZIONE CON CUSINETTO ANATOMICO

TIPOLOGIA: fascia.

STRUTTURA: morbido tessuto elastico; cuscinetto interno anatomico in silicone con scarico centrale per alluce.

ISTRUZIONI PER L'USO: infilare il piede nel cuscinetto.

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.


CONTROINDICAZIONI

Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro.
Lasciare asciugare bene. Non mettere ad asciugare sui caloriferi.


AVVERTENZE D'USO

- Dispositivo ad uso esclusivamente personale.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri  (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

CONSERVAZIONE



Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.
Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta FGP Srl indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare una e-mail a fgp@fgpsrl.it.
- L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al , contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

 **FGP srl**

Via Alessandro Volta 3 I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 - F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016