

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto o una limitata e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri (ad (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

#### AVVERTENZE D'USO

**INDICAZIONI:** tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la distribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio: lombalgia, lombosciatalgia, discartrosi, discopatie, post operatorio di ernia discale, contratture muscolari lombari, traumi lievi del rachide lombare.

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante

MD

Dispositivo medico

REF

Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco

LOT

Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016

 FGP srl

Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRGLAM  
Rev. 05 - 12/22



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



GLAM

Corsetto elastico moda




FGP

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il corsetto (fig. 1).
2. Chiudere la chiusura frontale in modo che si avverta una sensazione di compressione, ma non di costrizione e disagio (fig. 2).

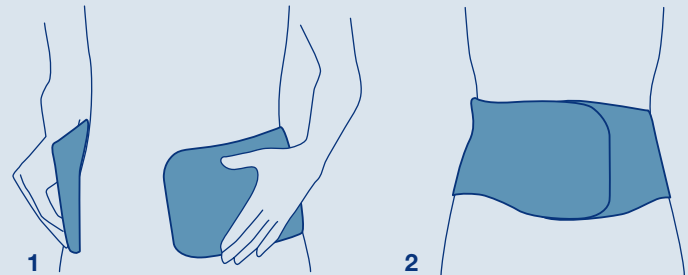

## STRUTTURA

- tessuto semirigido traforato jaquard, sagomata anatomicamente

## TIRANTI

- nessuno

## STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio presagomate, non removibili

## CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta

## NOTE

- particolarmente adatto alla silhouette femminile

## MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60–70 cm
S	70–80 cm
M	80–90 cm
L	90–100 cm
XL	100–110 cm
XXL	110–120 cm



**Altezza posteriore**  
25 cm

**Codice d'ordine:**  
GLA-100 (nero/nero)  
GLA-200 (nero/skin)

## PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

**Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.