

Al momento, nessuna nota.
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

Fratture vertebrali dorsali e lombari
Processi osteolitici vertebrali
Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 2 - 05/21




Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
facebook.com/fgpsrl



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

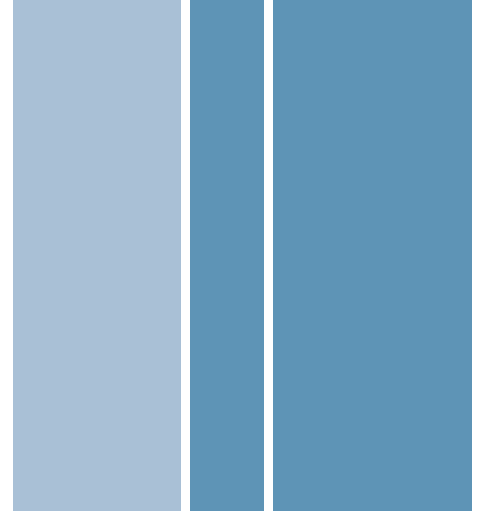

G 35-100 FISSO

Iperestensore vertebrale a 3 punti

NOTA
Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.




Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.
Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.

CONSERVAZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: lavare delicatamente con una spugna morbida. Fisciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in tamburo
	Non strirare
	Non lavare a secco

MANUTENZIONE



MISURE	Taglie	Ø Bacino
XL		106-115 cm
L		91-105 cm
M		76-90 cm
S		60-75 cm
		Normale
		Bassa

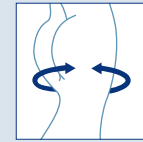

DESCRIZIONE
Struttura in alluminio anodizzato. Imbottitura in similpelle e materale espanso.
Pelota sternale snodabile, banda pelvica fissa. Piacca lombare posizionabile orizzontalmente o verticalmente.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il tutore avendo cura che il cuscinetto sternale in alto appoggi esattamente sullo sterno. Far passare la cintura d'appoggio dorsale dietro la schiena. Agganciare il gancio slitta, in modo che non risulti troppo stretto, come in figura A (nel caso ciò si verificasse, sganciare e regolare il Velcro®). Infine, bloccare la chiusura B.Fast e si otterrà il fissaggio definitivo (fig. B).
2. Per togliere il tutore aprire la chiusura B.Fast (Sequenza D, E e F) e poi il gancio slitta (Sequenza G, H e I).

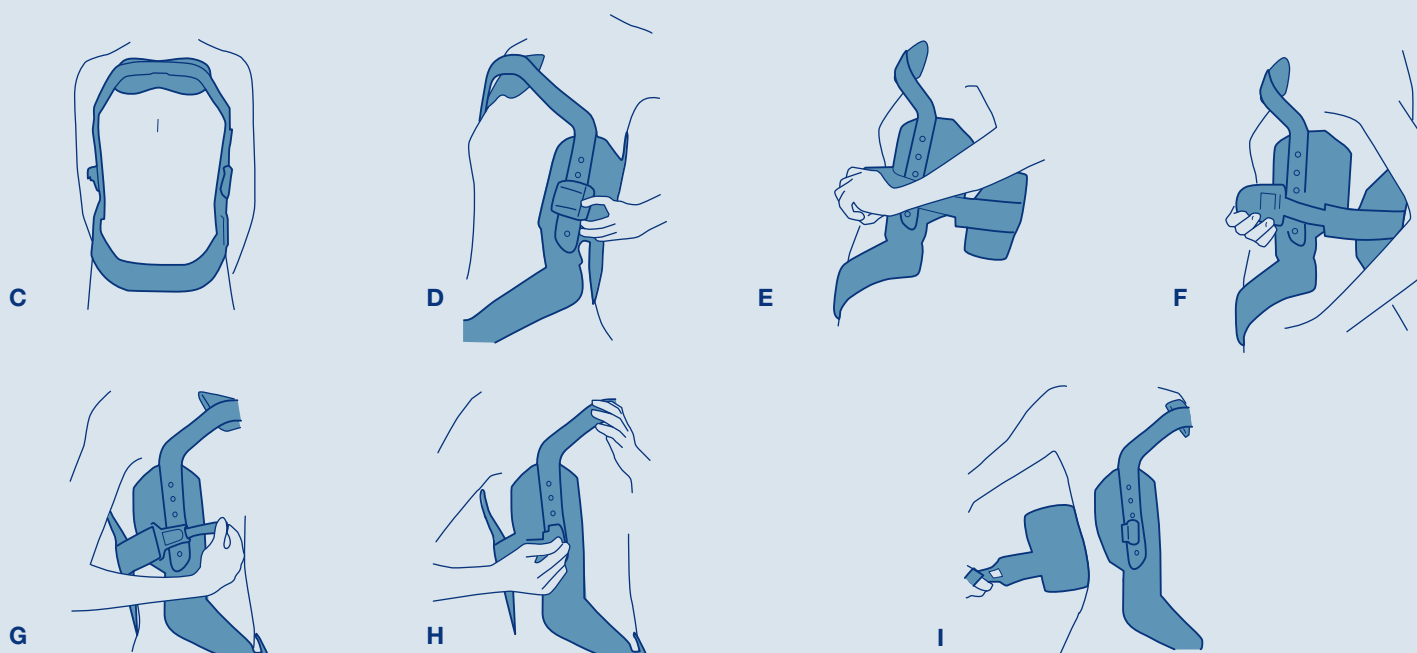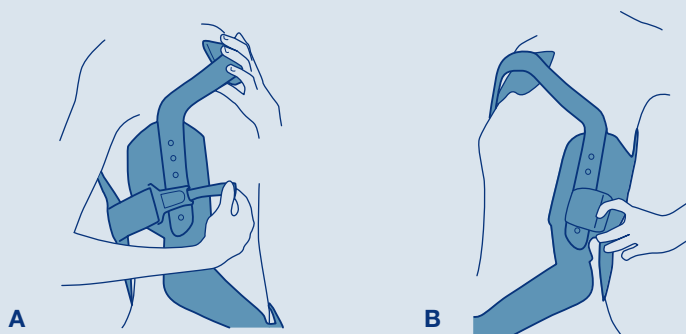

PER IL TECNICO ORTOPEDICO:

Istruzioni.

Semplicemente agendo nella parte sternale e in quella laterale è possibile regolare l'altezza e la larghezza del tutore.

